

## ELENCO ESAMI DI LABORATORIO (ORDINATI PER NOME)

**CODICI E SIGLE ALLERGENI IN APPENDICE 1 (pag. 57)** ●  
**PROFILI PROGRAMMATI PER REPARTI IN APPENDICE 2 e 3 (pag. 64)** ●

A	B	C	D	E	F	G	H	I-j	K-L	M	N	O	P	Q-R	S	T	U	V-W	X-Y-Z
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-------

		(*)Tranne alcune eccezioni dettagliate nella colonna specifica, le prestazioni di laboratorio devono pervenire al servizio non oltre le 5 ore dal prelievo e mantenute, anche durante il trasporto, ad una temperatura non superiore ai 35 °C (ottimale 10-25°C).				
cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione	
M49	VID	1-25 Vitamina D / 1-25(OH) <sub>2</sub> VIT.D3 / CALCITRIOLO / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 9 gg.	CR	
M14	17BE2	17 beta Estradiolo - 17 Beta E2 - Estrogeni - Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR	
M46	17OHP	17 idrossi Progesterone - 17 OH PG - 17 OH Progesterone	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	OGLIO-PO	
M59	VID25	25-OH Vitamina D - Vitamina D - Calciferolo - Vit. D3	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO	
60	5H	5 OH Indolacetico - Acido 5-idrossi indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 18 gg.	OGLIO-PO	
<b>A</b>						
242	AAT	A1A - Alfa1 antitripsina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO	
368	ABH	Ab anti Eparina – Anti Eparina - Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	Max 3 gg.	CR	
M26	ABINL	Ab Insulina F - Anti Insulina LIBERI - <b>DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'</b>				
M50	ABINS	Ab Insulina Totali - Anti Insulina - <b>DISABILITATO, NON SI ESEGUE PIU'</b>				
M56	AbTSH	Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 9 gg.	CR	
209A	209A	ABS - FTA (Caricare codice 209A screening LUE)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR	
324+324M	CARDIO(PROFILO)	ACA Anti Cardioplipina <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR	
324	AAC	ACA <b>IgG</b> - Anti cardioplipina <b>IgG</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR	
324M	AACM	ACA <b>IgM</b> - Anti cardioplipina <b>IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR	
M01	ACB	ACB - Acidi Biliari- Acidi Biliari Coniugati - Sali Biliari	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO	
OPACE	ACE	ACE - Angiotensin Converting Enzyme - Angiotensina	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO	
OPACET	ACET	Acetilcolina Anti recettore - Anti recettore nicotinico muscolare – nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 14 gg.	BS	
M01	ACB	Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB - Sali Biliari	Pr. T. Ruggine corta	max 8 gg.	CR	
60	5H	Acido 5-idrossi indolacetico - 5 OH Indolacetico - Metabolita urinario della Serotonina (Camp. Uina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 18 gg.	OGLIO-PO	
C1	accit	Acido citrico - Citraturia (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 8 gg.	OGLIO-PO	

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
C2	damin	Acido Delta Aminolevulinico - ALA (Urine su campione estemporaneo)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 20 gg	BS
C5	acfe	Acido fenilgliossilico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 15 gg.	OGLIO-PO
M47	FOLIC	Acido Folico - Folati (vitamina B9)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
C6	ippu	Acido Ippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 15 gg.	OGLIO-PO
OP22	ACLAT	Acido Lattico – Lattato	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
22CSF	22CSF	Acido lattico su Liquor - Lattato su Liquor	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
C7	mand	Acido Mandelico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 15 gg.	OGLIO-PO
C8	metil	Acido Metilippurico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 15 gg.	OGLIO-PO
C9	ossal	Acido Ossalico - Ossaluria (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESIS	max 5 gg.	OGLIO-PO
C36	c36	Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 20 gg.	BS
C10	tricl	Acido Tricloroacetico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 20 gg.	BS
39	ACUR	Acido urico - Urato - Uricemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
40	AU24	Acido urico urinario - Uricuria (Camp. urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
40F	40F	Acido urico su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
165	VALP	Acido Valproico - Valproato - Valproato di sodio	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
58	VMA	Acido Vanilmandelico - VMA (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 8 gg.	OGLIO-PO
M02	ACTH	ACTH - Ormone Andrenocortico	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 5 gg.	CR
OPADD	ADD	ADDIS - Conta di Addis (Urina di 3 ore, segnalare la quantità)	Contenitore URINA (CAMP. di 3h)	in giornata	OGLIO-PO
240	ROTA	Adenovirus + Rotavirus (feci)	Contenitore FECEI	1gg.	CR
M28	M28	ADH - Copeptina (si al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
C48	C48	Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP. 24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 15 gg.	OGLIO-PO
G105	g105	AFP - Alfa Feto Proteina materna - siero <b>IN GRAVIDANZA</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 7 gg.	CR
M04	AFP	AFP - Alfa Feto Proteine siero	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
LPAF	lpaf	AFP Liquidi - Alfa Feto Proteine in liquidi vari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
263	LEGIO	Ag Legionella - Antigene Legionella p. (Camp. Urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 2 gg.	CR
T320	KELL non inserire	Ag non ABO non Rh (ciascun antigene)	Pr. T. Rosso Grossa. + Pr.T.Viola	in giornata	POOP-CT
295A	<b>297DI</b> (PROFILO 297D+214IGA) o <b>297M</b> (PROFILO 297+214IGA)	AGA IgA - Anti Gliadina IgA- Anti Glutine IgA Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
295G	<b>297DI</b> (PROFILO 297D+214IGA) o <b>297M</b> (PROFILO 297+214IGA)	AGAIgG- Anti Gliadina IgG- Anti glutine IgG Caricare il profilo 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M per monitoraggio (con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
T80	AGGL	Agglutinine a frigore - Crioagglutinine	Pr.T.Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	max 3 gg.	POOP-CT
935		AGOASPIRATO PER MICRO			CR
C2	damin	ALA - Acido D. amino levulinico (Campione urine fine turno di lavoro o urine 24h)	Contenitore URINE (campione fine turno lavoro o esposizione, conservare in frigorifero)	max 20 gg	BS
261	ALBNE	Albumina (siero)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
261L	albas	Albumina (liquido ascitico)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
404	MA	Albuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemporaneo)	in giornata	OGLIO-PO
94	ALCOL	Alcolemia richiesta a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Litio-eparina)	max.1g	OGLIO-PO
94 + 95	95P (PROFILO)	Alcolemia richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI (seguire l'apposito protocollo)	2 Pr. T. Grigio - firmate		ASL CR
M03	AP	Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	Aldosterone <b>CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO - se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)</b>	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03STIM	APSTI	Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03U	ALDOU	Aldosterone su urina - AP Urinario (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 15 gg	BS
11 + 10B	EFTP (PROFILO)	Alfa 2 Globulina (Non si esegue il dosaggio. Inserire Elettforesi + Proteine cod. EFTP)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 1 gg	OGLIO-PO
G105	g105	Alfa Feto Proteina materna - AFP - <b>IN GRAVIDANZA</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 7 gg.	CR
M04	AFP	Alfa Feto Proteine - AFP	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
LPAF	lpaf	Alfa Feto Proteine in liquidi vari - AF su Liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
242	AAT	Alfa1 antitripsina - A1A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
241	AAG	Alfa1 glicoproteina acida - Mucoproteine	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
243	AMG	Alfa2 macroglobulina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
55	AMYL	Alfa-Amilasi totale	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
55C	55C	Alfa-Amilasi totale su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
55L	amdr	Alfa-Amilasi totale su liquido drenaggio	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
799	799	Allergeni vari e Ricombinanti (l'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1 a pagina 53</b> . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
C11	al	Alluminio nel SANGUE - Alluminemia	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	max 20 gg	BS
C11U	C11U	Alluminio nell'URINA	Contenitore URINE campione del mattino (10 ml circa) chiedere al LABORATORIO	max 20 gg	BS
52	ALP	ALP - Fosfatasi alcalina	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
45	GPT	ALT - GPT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
A35M	AAMA	AMA - Anti MITOCONDRIO	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
213	AMEBA	Ameba Anticorpi - Entamoeba histolytica - Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
509A	509A	Amebe - Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECEI	max 2 gg.	CR
M06	AMH	AMH - Ormone Antimulleriano	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
292P	AMIP	Amikacina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	max 15 gg.	BS
292V	AMIV	Amikacina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco) NB: si esegue a Brescia con procedura e provette dedicate - PRIMA DI ESEGUIRE CHIEDERE AL LABORATORIO	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	max 15 gg.	BS
47	IAMI	Amilasi pancreatica	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
47C	47C	Amilasi pancreatica su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
47L	ampdr	Amilasi pancreatica su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPLPAM	lpam	Amilasi su Liquidi cavitari vari (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
55	AMYL	Amilasi totale	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
55C	55c	Amilasi totale su liquido cavitario	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
55L	amdr	Amilasi totale su liquido drenaggio e/o pancreatico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
56	AMYLU	Amilasi urine (Campione urine estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
OPSAA	OPSAA	Amiloide sierica	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 14 gg.	PV
G291+G316+G317+G318+G412+G413	G320 (PROFILO)	AML/MDS Pannello ematologia N.B. Contattare Genetica CR	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 21 gg.	CR
C61		Aminoacidi plasmatici	Pr. T. verde scuro per Milano	max 10 gg.	
C61U		Aminoacidi urinari	Pr. Urina primo mattino	max 10 gg.	
57	AMMON	Ammoniemia - Ammonio - NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	in giornata	OGLIO-PO
57	AMMON	Ammonio - Ammoniemia -NH4	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
G01+G02+G108	AMNIO (PROFILO)	Amniocentesi		max 17 gg.	CR
A24	ANA_	ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
930	930	ANAEROBI Colturale su <b>LIQUIDI VARI</b> verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI - caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore emocoltura anaerobi o Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	max 4 gg.	CR
907	907	ANAEROBI Colturale su <b>TAMPONE FERITA</b> verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI- caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
G431	g431	ANALISI ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) <b>NB SI DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217 + moduli gen.</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 60 gg.	CR
A38	ANCA_	ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
A38P	PR3	ANCA PR3 (Anticorpi anti proteinasi 3) - c-ANCA PR3 - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
A38M	AMPO	ANCA MPO (Anticorpi anti mieloperossidasi) - p-ANCA MPO - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
M05	ASD	Androstenedione - ASD - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	max 3 gg.	CR
M92	M92	Androstenediolo glucuronide	Pr. Rossa grande per BS	max 30 gg.	BS
OPACE	ACE	Angiotensina – Angiotensin Converting Enzyme - A.C.E	Pr. T. Ruggine bassa	max 8 gg.	OGLIO-PO
844	P4	Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti A B- Anti Eritrocitari A B- Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76A	TITA	Anti A - Anti Eritrocitari Anti A - Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
844	P4	Anti Anisakis IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
	NON SI ESEGUE	Anti Adiuretina - Adiuretina anticorpi-ADH (non si esegue nemmeno a BS)			
T213	HBsAb	Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T216	HBEAB	Anti Antigene E - HBeAb - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
842	P1	Anti Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T213	HBsAb	Anti AU - Anti Antigene di superficie - HBsAb - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T76B	TITB	Anti B - Isoanticorpi Anti B - Anti Eritrocitari Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
258	BART	Anti Bartonella - Bartonella henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	Anti Beta 2 GP1 - Beta 2 Glicoproteina <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
338	B2 G	Anti Beta 2 GP1 <b>IgG</b> - B2 Glicoproteinal IgG	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
338M	B2 M	Anti Beta 2 GP1 <b>IgM</b> - B2 glicoproteina I IgM	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
	NON SI ESEGUE	Anti Bordetella (NON SI ESEGUE)			

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
211G	LYG	Anti Borrelia - LYME Anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
211M	LYM	Anti Borrelia - LYME Anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
211GW	211GW	Anti Borrelia burgdorferi Anticorpi <b>IgG</b> . Metodo: Western blot (Test di conferma)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
324+324M	CARDIO(PROFILO)	Anti Cardiolipina - ACA <b>IgG</b> e <b>IgM</b> - Cardiolipina	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
324	AAC	Anti Cardiolipina <b>IgG</b> - ACA IgG- Cardiolipina IgG	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
324M	AACM	Anti Cardiolipina <b>IgM</b> - ACA IgM	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
A39	CITRU	Anti CCP - Anti citrullina - Anti CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
227A	CLAPA	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi IgA (non si esegue più)			
513	513	Anti Chagas <b>IgG</b> e <b>IgM</b>	Pr. T. Rosso Grossa	max 9 gg.	CR
227G	227G	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
227M	227M	Anti Chlamydia pneumoniae anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
227G+227M	CLAPN(PROFILO)	Anti Chlamydia Pneumoniae <b>IgG</b> - <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
C60A	C60A	Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C60G	C60G	Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C60M	C60M	Anti Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Anti Chlamydia trachomatis - Anticorpi <b>IgG</b> su siero (N.B.Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
229G	CMVG	Anti Citomegalovirus <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229G+229M	CMV (PROFILO)	Anti Citomegalovirus <b>IgG</b> e <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229M	CMVM	Anti Citomegalovirus <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
A38	ANCA_	Anti Citoplasma Neutrofili screening - ANCA (P-ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
A39	CITRU	Anti Citrullina - Anti CPA - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
T214	HBcAb	Anti CORE - Anti HBc - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T217	HBCM	Anti CORE <b>IgM</b> - Anti Hbc IgM - HBc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
C65	C65	Anti Corteccia surrenalica	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 21 gg.	Mi San Raffaele
C63A	C63A	Anti Coxsackie anticorpi <b>IgA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C63G	C63G	Anti Coxsackie anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C63M	C63M	Anti Coxsackie anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
A39	CITRU	Anti CPA - Anti citrullina - Anti CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
M55	GAD	Anti Decarbossilasi Glutammico - Anti GAD	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 21gg.	BS
PV15	PV15	Anti Differite <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 21 gg	PV
A25	dsDNA	Anti DNA NATIVO	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A25	dsDNA	Anti DS DNA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
T216	HBEAB	Anti E - Anti Antigene E - HBeAb - Anti HBe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
231 T	231 T	Anti EBV <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti EBV <b>IgG - IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 M	231 M	Anti EBV <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
205	GHE	Anti Echinococco - Ghedini- W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34	ENAP (PROFILO)	Anti ENA - Profilo per il caricamento di tutti gli ENA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 17 gg.	CR
A33	cenp	Anti ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A34	iston	Anti ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A32	a_Jo1	Anti ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A28	a_RNP	Anti ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A29	a_SSa	Anti ENA anti - SSa	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A30	SSb	Anti ENA anti - SSb	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A31	SCL70	Anti ENA anti-SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A27	SM	Anti ENA anti-SM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A26	ENAsc	Anti ENA screening - Anticorpi anti-Antig. Nucl.Estraibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
296	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Anti Endomisio - Endomisio ricerca anticorpi - EMA - N.B. <b>CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
		Anti Enzima Tirois Fosfatasi - ANTI IA2 <b>NON SI ESEGUE PIU'</b>			
368	ABH	Anti Eparina - Ab anti Eparina – Anticorpi anti eparina	Pr. T. Azzurro bassa	Max 3 gg.	CR
231 T	231 T	Anti Epstein Barr Virus <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 M	231 M	Anti Epstein Barr Virus <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Anti Epstein Barr Virus <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Anti Eritrocitari A B - Anti A - Isoanticorpi Anti A B - Autoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76A	TITA	Anti Eritrocitari Anti A - ANTI A-Isoanticorpi Anti A - Autoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76B	TITB	Anti Eritrocitari Anti B-Anti B - Isoanticorpi Anti B - Autoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Anti Fosfolipidi - Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
PV17	PV17	Anti Francisella tularensis	Pr. T. Rosso per Pavia	max 21 gg.	PV
M55	GAD	Anti GAD - Anti Decarbossilasi Glutammico	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 21gg.	BS
295A	<b>297DI (PROFILO</b> 297D+214IGA) o <b>297M (PROFILO</b> 297+214IGA)	Anti Gliadina <b>IgA</b> - AGA IgA - Anti glutine IgA - <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
295G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti Gliadina <b>IgG</b> - AGA IgG - Anti glutine IgG <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
295A	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine <b>IgA</b> - Anti Gliadina IgA- AGA IgA - <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
295G	297DI (PROFILO 297D+214IGA) o 297M (PROFILO 297+214IGA)	Anti glutine <b>IgG</b> - Anti Gliadina IgG- AGA IgG - <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
T214	HBcAb	Anti Hbc - Anti CORE - HBcAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T217	HBCM	Anti Hbc IgM - ANTI CORE IgM - Hbc Ab IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T216	HBEAB	Anti Hbe - Anti E - Anti Antigene E - HBeAb	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213	HBsAb	Anti HBsAg - HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T227	MC	Anti HCV - Epatite C - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
262	HELIF	Anti Helicobacter Pylori ANTICORPI (feci) <b>N.B.CARICARE IL CODICE 262. Si esegue l'antigene</b>	Contenitore FECl	max 8 gg.	CR
230G	HSVg	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230G+230M	HERP(PROFILO)	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230M	HSVm	Anti Herpes Simplex Virus (1, 2) <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
232G	VARIG	Anti Herpes Zoster <b>IgG</b> - Varicella Zoster anticorpi IgG - Herpes Zoster IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Herpes Zoster <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
232M	VARIM	Anti Herpes Zoster <b>IgM</b> - Varicella Zoster anticorpi IgM - Herpes Zoster IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
T223	HIV	Anti HIV 1-2 - HIV - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
212	HTLV	Anti HTLV I – IIN.B. Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice T223 o HIV)	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	max 7 gg.	CR
C56B	IA2AB	ANTI-IA2 (Ab anti enzima tirosin fosfatasi)	Pr. T. Rosso per Milano	max 21 gg.	Mi San Raffaele
C56	C56	ANTI Insulina (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	max 21 gg.	Mi San Raffaele
A38	ANCA_	Anti Leucociti - ANCA screening (anticorpi anti citoplasma dei neutrofili P- ANCA C-ANCA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
A36	a_LKM	Anti LKM - Anti Microsomi epatici renali - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
512	512	Anticorpi anti Leishmania <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 7 gg.	CR
C66	C66	Anticorpi anti Legionella <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Rossa per BS	max 15 gg.	BS
225	FUNG	Anti Miceti - Precipitine – Miceti ricerca anticorpi - <b>NON SI ESEGUONO PIU'</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
A36	a_LKM	Anti Microsomi epatici renali - Anti LKM - LKM A - LKM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
M38	ABTPO	Anti Microsomiali - Anti Perossidasi - Anti T P O	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	CR



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
A38M	AMPO	Anti Mieloperossidasi p-ANCA - <b>MPO</b> - NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
A35M	AAMA	Anti MITOCONDRIO - AMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
233	MORB	Anti Morbillo - anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
M06	AMH	Anti Mulleriano ormone - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
A35S	AASMA	Anti MUSCOLATURA LISCIA - ASMA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
226G	226G	Anti Mycoplasma pneumoniae <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
226M	226M	Anti Mycoplasma pneumoniae <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
A24	ANA_	Anti Nucleo - ANA - Fattore Antinucleo - FAN	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A35P	PA	Anti parietali gastriche - APCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
234	PAROT	Anti Parotite - <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
222G	222G	Anti Parvovirus anticorpi <b>IgG</b> - Anti Parvovirus B19IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
222M	222M	Anti Parvovirus anticorpi <b>IgM</b> - Anti Parvovirus B 19 <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
A39	CITRU	Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
M38	ABTPO	Anti Perossidasi (anti microsomiali) - Anti T.P.O	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
T84	AbPIA	Anti Piastrine - Captur E P	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 5 gg.	CR
A38P	PR3	Anti PR3 (anticorpi anti proteinasi 3) <b>c-ANCA</b> NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "A38" TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
363G	AP-G	Anti Protrombina <b>IgG</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
363G+363M	APROT (PROFILO)	Anti Protrombina <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
363M	AP-M	Anti Protrombina <b>IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
OPACET	ACET	Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare - nAChR	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 14 gg.	BS
M56	AbTSH	Anti recettori TSH - Ab TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 9 gg.	CR
		Anti reticolina - caricare anti transglutaminasi			
		Anti ribosomi - chiamare SIEROLOGIA. Lo caricano se il test di primo livello per lupus viene positivo.			
235	RiCK	Anti Rickettsie - Weil Felix - Rickettsiosi Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
218G1	218g1	Anti Rosolia <b>IgG</b> - N.B.USARE QUESTO CODICE "218G1" PER CONTROLLO DELLO STATO IMMUNITARIO - per pazienti gravide utilizzare il profilo 218 (IgG+IgM) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
218G + 218M	218 (PROFILO)	Anti Rosolia <b>IgG + IgM</b> - N.B. USARE QUESTI CODICI PER PAZIENTI GRAVIDE Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
C73	FUNG	Anti Saccaromyces cerevisiae IgG - ASCA IgG	Pr. T. Rosso x San Raffaele	max 21 gg.	MI
C74	FUNG	Anti Saccaromyces cerevisiae IgA - ASCA IgA	Pr. T. Rosso x San Raffaele	max 21 gg.	MI

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
515	515	Anti Strongyloides stercoralis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
514	514	Anti Schistosoma spp - NON SI ESEGUE PIU' - DISABILITATO	Pr. T. Rosso Grossa	max 10 gg.	CR
OP612A	SpeA	Anti Spermatozoi ADESI	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
M38	ABTPO	Anti TPO - Anti Perossidasi (anti microsomiali)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M24	ABHTG	Anti Tireoglobulina - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M24 + M38	AT(PROFILO)	Anti Tiroidei ( Anti Tiroe globulina + Anti Perossidasi (microsomiali))	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
224	224	Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
206G + 206M	206(PROFILO)	Anti Toxoplasma <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
206G+206M	TOX(PROFILO) o 206(PROFILO)	Anti Toxoplasma IgG + IgM - N.B.Caricare sempre entrambi i codici 206G+206M (o il profilo). Non caricare l'eventuale test per Toxo avidity che verrà aggiunto automaticamente dal laboratorio se necessario (Disp. Regionale)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
264	TOXAV	Anti Toxoplasma IgG avidity - <b>N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
297 o 297D	<b>297DI</b> (PROFILO 297D+214IGA) o <b>297M</b> (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi <b>IgA - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
297G	<b>297DI</b> (PROFILO 297D+214IGA) o <b>297M</b> (PROFILO 297+214IGA)	Anti Transglutaminasi <b>IgG - N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
M56	AbTSH	Anti TSH - Anti recettori TSH - Ab TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 14 gg.	CR
232G	VARIG	Anti Varicella Zoster anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
232G+232M	HERPZ(PROFILO)	Anti Varicella Zoster anticorpi <b>IgG+ IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
232M	VARIM	Anti Varicella Zoster anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
TOXCA	TOXCA	Anticorpi anti Toxocara canis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 20 gg.	PV
<b>COVABQ</b>	<b>COVQ</b>	<b>Anticorpi COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS</b>	<b>Pr. T. Ruggine Bassa</b>	<b>max 4 gg.</b>	<b>CR</b>
COVAB	COVAB	Anticorpi COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Ruggine Bassa	max 4 gg.	CR
T133	HDVAg	Antigene EPATITE DELTA	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
T212	AU	Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
M10	CEA	Antigene Carcinoembrionale - CEA	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
249	CRIPS	Antigene Criptococco su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	5 gg.	CR
T215	HBeAg	Antigene E - HBeAg Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
962	CMVRT	Antigene Early CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
T215	HBeAg	Antigene Hbe - HBeAg - Antigene E	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
262	HELIF	Antigene Helicobacter Pylori - Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECl	max 8 gg.	CR
263	LEGIO	Antigene Legionella pneumophyla. - Legionella (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 2 gg.	CR
510A	510A	Antigene NOROVIRUS ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
266	PNEU	Antigene Pneumococco - Pneumococco (Camp. urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	CR
M91	TPA	Antigene Polipeptidico Tissutale - TPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	BS
M32	PSA	Antigene Prostatico Specifico - PSA - PSA Totale	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
A26	ENAsc	Antigeni Nucleari Estraibili Autoanticorpi – (ENA) - screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
OP319	At3	Antitrombina III - ATIII	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
C40	ANTIM	Antimonio ricerca su URINA	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
M03	AP	AP CLINOSTATISMO - Aldosterone Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa)	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03 + M03STIM	ALD (PROFILO)	AP <b>CLINOSTATISMO + ORTOSTATISMO</b> (se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni M03STIM = aldosterone ortostatismo - per gli interni M03 = adosterone in clinostatismo)	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03STIM	APSTI	AP ORTOSTATISMO - Aldosterone Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta)	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg	BS
M03U	ALDOU	AP Urinario - ALDOSTERONE su urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 15 gg	BS
		APC, MUTYH geni poliposi familiare del colon N.B. <b>Contattare direttamente Genetica CR 5217</b>			
A35P	PA	APCA - Anti parietali gastriche	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
OP390	APIX	Apixaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390B	APIXB	Apixaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390C	APIX2	Apixaban dosaggio (Dopo 2 ore dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
13	APOA	APO A 1- Apolipoproteina A	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
13+14	APO (PROFILO)	APO <b>A e B</b>	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
14	APOB	APO B - Apolipoproteina B	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
13	APOA	Apolipoproteine A - APO A1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
13+14	APO (PROFILO)	Apolipoproteine <b>A e B</b>	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
14	APOB	Apolipoproteine B - APO B	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
244	HPT	APT - Aptoglobina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	in giornata	OGLIO-PO
244	HPT	Aptoglobina - APT	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP329	Ptt	APTT - Tempo di tromboplastina parziale - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OPARIP	ARIP	Aripirazolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
G431	g431	ARRAY-CGH (su sangue perif., mat. abortivo, liq. amniotico, villi coriali) <b>DEVE PRENOTARE genetica CR Tel 5217+</b> moduli gen	<b>N.B. SI</b> Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 60 gg.	CR
C45U	C45U	Arsenico su urine	Barattolo urine	max 15 gg.	BS
C73	FUNG	ASCA IgG - Anti Saccaromyces cerevisiae IgG	Pr. T. Rosso x San Raffaele	max 21 gg.	MI

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
C74	FUNG	ASCA IgA - Anti Saccaromyces cerevisiae IgA	Pr. T. Rosso x San Raffaele	max 21 gg.	MI
842	P1	Ascaris IgE	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
M05	ASD	ASD - Androstenedione - Delta 4 Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	max 3 gg.	CR
200	TAS	ASLO - Titolo anti streptolisinico - TAS	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
A35S	AASMA	ASMA - Anti MUSCOLATURA LISCIA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
951T	ASTRA	Aspirato da tracheostomia	Contenitore sterile BA	max 4 gg.	CR
951A	ASPER	ASPERGILLUS - Ricerca quantitativa del DNA	BA - BAL - plasma (tappo viola)	max 3 gg.	CR
		Assetto Lipidico (Caricare COL.T. 17- TRI. 21 - HDL 16 - LDL 18)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
44	GOT	AST - GOT - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OP319	At3	ATIII - Antitrombina III	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331	QUI	Attività protrombinica - Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
T212	AU	AU - Antigene AU - HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T76A + T76B	AAB (PROFILO)	Autoanticorpi Anti A B-Isoanticorpi Anti A B-Anti A B-Anti Eritrocitari A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76A	TITA	Autoanticorpi Anti A-Isoanticorpi Anti A-Anti A - Anti Eritrocitari A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76B	TITB	Autoanticorpi Anti B-Isoanticorpi Anti B - Anti B - Anti Eritrocitari Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
A26	ENAsc	Autoanticorpi anti-Antigeni Nucleari Estraiibili – screening	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
265	265	Avidity Citomegalovirus - CMV avidity	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
264	TOXAV	Avidity Toxo - IgG <b>N.B. Caricare il profilo TOX, se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio (disposizione Regionale)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
1	BUN	Azoto Ureico - Azotemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
5	AZOTU	Azoturia - urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
3F	UREA1	Azoturia - urea urinaria (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
<b>B</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
M48	VB12	B12 - VITAMINA B12 - Cobalamina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
338+338M	B2G (PROFILO)	B2 glicoproteina I - Anti Beta 2 GP1 <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
338	B2 G	B2 glicoproteina I anticorpi <b>IgG</b> - Anti Beta 2 GP1 <b>IgG</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
338M	B2 M	B2 glicoproteina I anticorpi <b>IgM</b> - Anti Beta 2 GP1 <b>IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
T53	B2S	B2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA ( <a href="#">vecchio codice e alias OPT53</a> )	Pr. T. Rosso alta stretta	in giornata	CR
T78	B2U	B2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	max 3 gg.	CR
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	Bacillo di Koch- BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica (All'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	max 50 gg.	CR
957	957	BACILLO DIFTERICO ricerca COLTURALE. (All'inserimento specificare il materiale)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
161	FENO	Barbiturici - Fenobarbital	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
258	BART	BARTONELLA henselae anticorpi - Graffio di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
15	BENCE	Bence Jones - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
C36	c36	Benzene - Acido T,T-Muconico (benzene) - Metaboliti urinari del benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	max 20 gg.	BS
157	157	Benzodiazepine nel sangue	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
		Benzodiazepine urina -DISABILITATO NON SI ESEGUE eventualmente indirizzare l'utente a portare le URINE all'ASL di Cremona dott. ISERNIA 0372 497893			
T53	B2S	BETA 2 Micro - B2 Microglobulina SIERICA (vecchio codice e alias OPT53)	Pr. T. Rosso alta stretta	in giornata	CR
T78	B2U	BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA	Contenitore URINA (campione di 1 ora - bere un bicchiere di acqua e raccogliere l'urina dopo 1 ora)	max 3 gg.	CR
150	BHCG	Beta HCG - HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
G103+G106	Bitest (PROFILO) O G107 (PROFILO)	BI TEST - DOWN (dalla 14° alla 16° settimana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
GAV	GAV	Bicarbonati - Emogasanalisi venosa (in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
	FE+TR+FER	Bilancio marziale del ferro - caricare FERRO 66 + TRANSF 67 + FERRIT T264		in giornata	OGLIO-PO
948	BI	BILE - Esame COLTURALE	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
4	BIL	Bilirubina reflex PER ESTERNI	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OP4	OPBIL	Bilirubina reflex - PER INTERNI (esegue direttamente la bilirubina diretta)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	BK - Micobatteri Ricerca colturale e microscopica	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	max 50 gg.	CR
953N	GEN	BK Sonde Genetiche Dirette	Contenitore STERILE	max 10 gg.	CR
989	EMOBK	BK su EMOCOLTURA	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	max 50 gg.	CR
65	BNP	BNP - Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
208	208	Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 7 gg.	CR
211G	LYG	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
211M	LYM	Borrelia Sierodiagnosi - LYME Anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
		BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2 geni cancro familiare del pancreas N.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2 geni cancro mammella-ovaio familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217			
		BRCA2, BRCA1, HOXB13 geni cancro della prostata familiare N.B.Contattare direttamente Genetica CR tel. 5217)			
BRIVA	BRIVA	Brivaracetam	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
951	951	Broncoaspirato Colturale (all'inserimento specificare il materiale)	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
203	WW	Brucelle Sierodiagnosi (Caricare Widal Wright) - su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
1	BUN	BUN - Azotemia - Azoto Ureico	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
<b>C</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
C41	c41	C1 Inibitore	Pr. T. Giallo rosso bassa	max 16 gg.	OGLIO-PO
C1Q	C1Q	C1q	Pr. T. Rosso grossa	max 20 gg.	Mi San Raffaele
220	C3	C3 - Complemento C3 - C3c	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
220L	c3si	C3 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
220 + 219	C3C4 (PROFILO)	C3 e C4	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
219	C4	C4 - Complemento C4	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
219L	c4si	C4 su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
23	CA	CA - Calcemia - Calcio	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
CAI	CAI	CA ++ - Calcio Ionizzato	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
M09	CA125	CA 125	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
M07	CA153	CA 15-3	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
LPC15	lpc15	CA 15-3 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
M08	CA199	CA 19-9 - GICA	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
LPC19	lpc19	CA 19-9 su Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC125	lpc12	CA-125 Liquidi Cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
C77	CA50	CA 50 - Antigene carboidratico CA 50	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	S. Raffaele
C12	cd	Cadmiemia - Cadmio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg	BS
C12	cd	Cadmio su sangue - Cadmiemia	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg	BS
C13	cdu	Cadmio su urina Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg	BS
C13	cdu	Cadmiuria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg	BS
M49	VID	Calciferolo - Calcitriolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 - VIT.D3 Diidrossi VitaminaD(se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
23	CA	Calcio - Calcemia - CA	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
CAI	CAI	Calcio Ionizzato - CA ++	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
24	CAUR	Calcio urina (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
24F	24F	Calcio urina spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
M42	CT	Calcitonina - CT	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 15 gg.	CR
M49	VID	Calcitriolo - Calciferolo - 1-25 Vitamina D - 1-25 (OH)2 VIT.D3 VIT.D3 - Diidrossi VitaminaD (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
24	CAUR	Calciuria - (Camp urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
24F	24F	Calciurua spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
92	CALCO	Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	max 3 gg.	OGLIO-PO
498	498	Calprotectina fecale	Contenitore FECl	max 5 gg.	CR
906	COPRO	Campylobacter ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
A38P	PR4	c-ANCA - PR3 (anticorpi anti proteinasi 3)NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO,ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE"ANCA"TEST DI SCREENING; SE RISULTERA' POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
938	DERMA	Candida - Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	max 8 gg.	CR
922N	CAN	Candida nelle feci	Contenitore feci	max 3 gg.	CR
68	TIBC	Capacità ferro-legante della Transferrina	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
T84	AbPIA	Captur E P - Anticorpi Anti-Piastrine	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 5 gg.	CR
929C	TCARB	Carbapenemasi Tampone Rettale	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
162	CARBA	Carbamazepina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
COHB	COHB	Carbossiemoglobina - COHb	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
324+324M	CARDIO (PROFILO)	Cardiolipina - Anti Cardiolipina - ACAIgG e IgM	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
324	AAC	Cardiolipina <b>IgG</b> - Anti Cardiolipina IgG - ACA <b>IgG</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
324M	AACM	Cardiolipina <b>IgM</b> - Anti Cardiolipina IgM - ACA <b>IgM</b>	Pr. T. Azzurro bassa	max 16 gg.	CR
G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Cariotipo - Mappa Cromosomica su sangue periferico - <b>CONSENSO</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Cariotipo midollare - Mappa cromosomica su prelievo midollare	Contenitore adeguato	max 23 gg.	CR
C48	CATU	Catecolamine urinarie (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina) (Camp. Urina 24h acidificate <b>SEGNALARE DIURESIS</b> )	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) <b>SEGNALARE DIURESIS</b>	max 15 gg.	OGLIO-PO
153	KL	Catene Leggere Libere Kappa - Lambda - Kappa Lambda Free (siero) Determinazione quantitativa	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
407KL	KLUR	Catene Leggere Libere KAPPA e LAMBDA nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. O 24 h)	max 3 gg.	OGLIO-PO
913	CATET	CATETERI VARI Colturale (scegliere il materiale all'inserimento)	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
G80	G80	CBS Mutazioni genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
A39	CITRU	CCP - Anti citrullina - CPA - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
T831+T832+T833	T83 (PROFILO)	CD 45 Tipizzazione Linfocitaria	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 4 gg.	CR
		CDKN2A gene Melanoma familiareN.B.Contattare direttamente Genetica CR 5217			CR
C43	TRDE	CDT - Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	OGLIO-PO
M10	CEA	CEA - Antigene Carcinoembrionale	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
LPCEA	lpcea	CEA Liquido	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
297M o 297DI	<b>297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)</b>	CELIACHIA (profilo )N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
197	cerul	Ceruloplasmina	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
G431	g431	CGH ARRAY ( su sangue perif., mat. Abortivo, liq. Amniotico, villi coriali) <b>NB</b> <b>Contattare genetica CR per conferma + moduli genetica</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 60 gg.	CR
59	PCHE	CHE - Pseudocolinesterasi - Colinesterasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
505	CHYMO	Chimico Fisico - Chimotripsina - Potere triptico (Feci)	Contenitore FECEI	max 2 gg.	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Chimico fisico Liquido Ascitico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPLPL	lpl	Chimico fisico Liquido Pleurico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
174A	LSI	Chimico fisico Liquido sinoviale (si esegue esame microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
605	LIQUO	Chimico fisico Liquor (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
OPLCAVI	lcavi	Chimico fisico Liquido Cavitario (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
505	FCHI	Chimotripsina - Potere triptico - Chimico Fisico (Feci) NON SI ESEGUE PIU' - AL SUO POSTO RICHIEDERE ELASTASI	Contenitore FECEI	max 2 gg.	OGLIO-PO
228+V01	228P (PROFILO)	Chlamydia Trachomatis (metodo diretto)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
227G + 227M	CLAPN (PROFILO) o 248 (PROFILO)	Chlamydia pneumoniae anticorpi <b>IgG - IgM</b> (siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
227G	CLAPG	Chlamydia pneumoniae <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
227M	227M	Chlamydia pneumoniae <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
C60A	C60A	Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C60G	C60G	Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C60M	C60M	Chlamydia psittaci anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
227TR_G	251 (PROFILO)	Chlamydia trachomatis anticorpi <b>IgG siero</b> (Anti IgA e IgM non si eseguono più)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
228	228	Chlamydia e Gonococco su MATERIALI VARI. Al caricamento scegliere il materiale.	Set Chlamydia	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone URETRALE	Set Chlamydia o barattolo urina sterile	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CERVICALE	Set Chlamydia	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone CONGIUNTIVALE	Set Chlamydia	2gg.	CR
228	CLAM	Chlamydia Trachomatis Ricerca diretta su Tampone MATERIALE GENERICO (specificare il materiale all'inserimento)	Set Chlamydia	2gg.	CR
T69	CIC	CIC - Immunocomplessi circolanti - ICC	Pr. T. Giallo rosso bassa	max 7 gg.	CR
M58	CAP	Ciclasì Attivante il PTH - PTH 1-84 (CAP) - Paratormone 1,84 CAP - Paratormone (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
M57	CIP	Ciclas Inattivante il PTH - PTH 7-84 (CIP) - Paratormone 7,84 CIP(da non caricare se richiesto genericamente Paratormone ma caricare CAP) - NON SI ESEGUE PIU'	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
169	CICLO	Ciclosporina A	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	max 5 gg.	OGLIO-PO
CITO	CITO	Citologico (generico)	Contenitori e modalità da richiedere al Laboratorio	28 gg	CR
UCI	UCI	Citologico Urinario (di norma si esegue su tre campioni)	Contenitori con conservante (Thin Prep CytoLyt solution) da richiedere al Laboratorio con le modalità di raccolta	28 gg.	CR
229G	CMVG	Citomegalovirus anticorpi IgG - Anti Citomegalovirus <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229M	CMVM	Citomegalovirus anticorpi IgM - Anti Citomegalovirus <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus <b>Antigene precoce</b> - CMV <b>Early Antigen in PCR Real Time</b>	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
265	265	Citomegalovirus <b>Avidity</b> - CMV <b>Avidity</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	Citomegalovirus <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
962	CMVRT	Citomegalovirus ( <b>acidi nucleici del virus in PCR Real Time</b> ). Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
C1	accit	Citraturia - Acido citrico (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 8 gg.	OGLIO-PO
A39	CITRU	Citrullina - Anti Peptidi Ciclici - Anti CCP - Anti - citrullina - AntiCPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
51	CPK	CK (CPK-NAD) - Creatinchinasi – Creatinfosfochinasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
53	CKMBM	CKM - CKMB massa - Isoenzimi CK	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
27	CL	CL - Cloruremia - Cloro	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
28	CLUR	CL Urinario - Cloro urinario (Camp. Urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
28F	28F	Cloro urinario spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
70C+ 70S+ 70U	70 (PROFILO)	Clearance della Creatinina (Camp. urina 24 h. Segnalare DIURESIS, PESO, ALTEZZA)	Pr. T. Ruggine alta stretta + Campione URINA 24h	in giornata	OGLIO-PO
G341+G342+ G410+G319+ G392+G411	G321 (PROFILO)	CLL Pannello ematologia <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 28 gg.	CR
916N	CLO	Clostridium Difficile Ricerca tossina nelle feci (campione feci In ghiaccio)	Contenitore STERILE <u>in ghiaccio</u>	1 g.	CR
C62	C62	Clozapina	Pr. T. Rossa Grossa	max 16 gg.	PV
229G	CMVG	CMV - Citomegalovirus <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229G + 229M	CMV (PROFILO) o 229 (PROFILO)	CMV - Citomegalovirus <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
229M	CMVM	CMV - Citomegalovirus <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
265	267	CMV <b>Avidity</b> - Citomegalovirus <b>Avidity</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
962	CMVRT	CMV ( <b>acidi nucleici del virus in PCR Real Time</b> ) - Citomegalovirus. Determinazione Quantitativa (si esegue anche su urina solo per neonati nei primi tre giorni di vita).	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
M48	VB13	Cobalamina - B12 - VITAMINA B12	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
C35	c35	Cobalto su sangue (plasma)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg	BS
COHB	COHB	COHb - Carbossiemoglobina	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolemia - Colesterolo totale	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
17L	colpl	Colesterolo su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
16	HDL	Colesterolo HDL	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
18	LDL	Colesterolo LDL - LDL	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
17	TCOL	Colesterolo totale - Colesterolemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
59	PCHE	Colinesterasi - Pseudocolinesterasi - CHE	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
926A	CCN	Colonizzazione batterica neonatale (Streptococcus agalactiae - Batteri esigenti e non, Micoplasmi urogenitali)	Tamponi + brodino R1 per micoplasmi		CR
940	GRAM	Colorazione di Gram Esame microscopico	Vetrino	max 1 gg.	CR
930	930	Colturale ANAEROBI su <b>LIQUIDI VARI</b> . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI. Caricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Flaconcino "Port a Germ" per ricerca Anaerobi	max 4 gg.	CR
907	907	Colturale ANAEROBI su <b>TAMPONE FERITA</b> . Verrà richiesto di specificare il materiale, per ricerca ANAEROBI caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)	Tampone con terreno di trasporto	max 4 gg.	CR
957	957	Colturale BACILLO DIFTERICO su Tampone faringeo	Tampone con terreno di trasporto	max 4 gg.	CR
951	951	Colturale Broncoaspirato	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
906	COPRO	Colturale Campylobacter ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
913	CATET	Colturale CATETERI VARI	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
919	919	Colturale di LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE per ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
905	MAIC	Colturale di Materiale da intervento chirurgico, ricerca per batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
925	925	Colturale E. coli enteropatogeno nelle feci	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
909	ES	Colturale escreato per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
921	TCONG	Colturale Essudato Congiuntivale (verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto (piccolo) +1 Vetrino	max 4 gg.	CR
915	TNASO	Colturale essudato nasale (verrà richiesto di specificare se destro o sinistro)	Tampone con terreno trasporto (piccolo)	max 4 gg.	CR
906	COPRO	Colturale feci - Coprocoltura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco RICERCA DIRETTA (al caricamento propone i materiali su cui si esegue)	Contenitore STERILE adeguato	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su CERVICE (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su essudato CONGIUNTIVA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto		CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO (specificare il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su URETRA (specificare il materiale al caricamento)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Colturale Gonococco Ricerca su URINA (specificare il materiale al caricamento)	Campione urina <b>1° mitto</b>		CR
930	930	Colturale LIQUIDI BIOLOGICI VARI (verrà richiesto di specificare il materiale) per ricerca ANAEROBI, ricaricare il codice scegliendo il relativo materiale contrassegnato (ANA)	Contenitore STERILE + Flaconcino "Port a Germ" per eventuale ricerca Anaerobi	max 4 gg.	CR
948	BI	Colturale LIQUIDO BILIARE esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
914	914	Colturale Liquido Seminale	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
936	LIQ	Colturale LIQUOR per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	max 4 gg.	CR
924N	PM	Colturale Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasporto	max 2 gg	CR
932	932	Colturale Mycoplasma su MATERIALE DIVERSO (specificare al caricamento)	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)		CR
932	932	Colturale Mycoplasma Ureaplasma su MATERIALE DIVERSO da specificare al caricamento. (Non si esegue su vagina ma su cervice)	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)	max 4 gg.	CR
952	MENIN	Colturale NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
930	930	Colturale per LIQUIDO PLEURICO ricerca batteri e miceti. Specificare il materiale "Liquido Pleurico" all'inserimento dell'esame.	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
954	954	Colturale per ricerca di batteri e miceti in MIDOLLO OSSEO-Mielocoltura	Flacone emocoltura		CR
924N	PM	Colturale per ricerca MRSA	Tampone con terreno trasporto	max 2 gg.	CR
939	939	Colturale PUS - per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
957	957	Colturale ricerca BACILLO DIFTERICO. All'inserimento specificare il materiale	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
906	COPRO	Colturale Salmonella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
911	SEPRO	Colturale SECRETO PROSTATICO per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
906	COPRO	Colturale Shigella ricerca nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ricerca batteri e miceti	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
907	TAFE	Colturale TAMPONE FERITA per ANAEROBI - verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA(ANA)"	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
931N	TRICO	Colturale Trichomonas su materiali vari (da specificare al caricamento)	Tampone secco e brodo Trichosel	3 gg.	CR
931N	TRICO	Colturale TRICHOMONAS VAGINALIS	Tampone secco e brodo Trichosel	max 2 gg.	CR
932	932	Colturale Ureaplasma su MATERIALI DIVERSO (specificare al caricamento)	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
903	URO	Colturale Urina	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
917	VIBR	Colturale VIBRIO SPP	Contenitore FECl	max 4 gg.	CR
923	YERS	Colturale Yersinia nelle feci	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
929	TVARI	Colturali tamponi vari (esempio Tampone Cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc.)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
929S	929S	Colturale per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
220	C3	Complemento C3 - C3 - C3c	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
220 + 219	C3C4 (PROFILO)	Complemento <b>C3 e C4</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
219	C4	Complemento <b>C4 - C4</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OPADD	ADD	Conta di Addis (urina di 3 ore) - ADDIS	Contenitore URINA (CAMP.3h)	in giornata	OGLIO-PO
304	PIAS	Conteggio piastrine in CPT –codice da utilizzare <b>solo nei casi di incompatibilità all'EDTA</b> (diversamente caricare <b>Emocromo senza formula cod. 300U</b> )	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
OP303	RE	Conteggio reticolociti R	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
T54N	T54N	Coombs diretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	max 1 g.	POOP-CT
T55	COI	Coombs Indiretto - Test di Coombs Indiretto	Pr. T. Viola (+ bollino)	max 1 g.	POOP-CT
M28	M28	Copeptina (al posto di ADH - vasopressina)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
906	COPRO	Coprocoltura (Salmonella - Shigella - Campylobacter)	Contenitore STERILE per FECl	max 4 gg.	CR
COV19	COV19	CORONAVIRUS tampone molecolare	Tampone per Coronavirus	max 2 gg.	CR
COVAG	COVAG	CORONAVIRUS tampone rapido antigenico	Tampone per Coronavirus	max 2 gg.	CR
SALIV	SALIV	CORONAVIRUS ricerca molecolare su saliva	Tampone salivare	max 2 gg.	CR
COVABQ	COVQ	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUANTITATIVA (IgG anti S1 e S2)	Pr. T. Ruggine Bassa	max 4 gg.	CR
COVAB	COVAB	CORONAVIRUS ricerca sierologica anticorpi QUALITATIVA (Ab tot. anti N)	Pr. T. Ruggine Bassa	max 4 gg.	CR
T214	HbCAb	CORE - HBC	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T217	HBCM	Core IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Hbc Ab IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
M11	CORTI	Cortisolo sierico (ore 8)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
OC2	OC2	Cortisolo sierico (ore16)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 5 gg.	CR
M11U	CORTI	Cortisolo urinario (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 3 gg.	CR
236G	COXG	Coxiella Burnetii anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg	CR
236M	COXM	Coxiella Burnetii anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg	CR
C63A	C63A	Coxsackie anticorpi <b>IgA</b>	Pr. T. Rossa Grande	max 16 gg.	BS
C63G	C63G	Coxsackie anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Rossa Grande	max 16 gg.	BS
C63M	C63M	Coxsackie anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Rossa Grande	max 16 gg.	BS
A39	CITRU	CPA - Anti citrullina - CCP - Anti Peptidi Ciclici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	CR
M12STIM	CPC (non eseguiamo stimolo)	C-PEPTIDE basale+ 4 prelievi dopo stimolo con glucagone ESEGUAMO STIMOLO	NON		

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
M12	CPEP	C-PEPTIDE sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	max 5 gg.	CR
51	CPK	Creatinchinasi - CK (CPK-NAD) - Creatinfosfochinasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
51	CPK	Creatinfosfochinasi - Creatinchinasi - CK (CPK-NAD)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
41	CREA	Creatinina - Creatininemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
42F	42F	Creatininuria su campione estemporaneo (Inserire 0 zero quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
42	CRUR	Creatininuria delle 24 h (Camp. urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
T80	AGGL	Crioagglutinine - Agglutinine a frigore	Pr.T. Ruggine Grossa + Pr.T.Viola (contrassegnare con bollino)	max 3 gg.	POOP-CT
T10A	CGB	Crioglobuline Ricerca	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	8 gg.	OGLIO-PO
T10B	CRIOF	Criofibrinogeno Ricerca	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	9 gg	OGLIO-PO
CGTIP	CGTIP	Crioglobuline Tipizzazione	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	9 gg.	OGLIO-PO
T10A	CRG	Crioprecipitato QUALITATIVO	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	9 gg	OGLIO-PO
CGTIP	CGTIP	Crioprecipitato TIPIZZAZIONE	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	9 gg.	OGLIO-PO
249	CRIPS	Criptococco - Antigene nel siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	5 gg.	CR
506A	CRIPT	Criptosporidium nelle feci Antigene	Contenitore FECEI	max 3 gg.	CR
C15	cr	Cromo - Cromemia su siero (solo se richiesto <b>specificatamente</b> su plasma utilizzare le provette verdi piccole)	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	max 20 gg	BS
M53K	CGRA	Cromogranina A	Pr. T. Rosso alta stretta	max 7 gg.	OGLIO-PO
G62	G62	Cromosoma Y Microdelezioni	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 23 gg.	CR
C16	cru	Cromuria - Cromo su urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg	BS
M42	CT	CT - Calcitonina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 15 gg.	CR
M22	M22	CTX - Telo peptide C-Terminale del collagene di tipo I - <b>SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)</b>	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
C17	cu	CU - Rame - Cupremia (siero)	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO
C18	cuu	CU Urina - Cupruria - Rame urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
C17	cu	Cupremia	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO
C18	cuu	Cupruria - Rame urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
CURP	curp	Curva della Prolattina (3 Prelievi)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 8 gg.	CR
75G	75G	Curva Glicemica – screening in GRAVIDANDA. <b>SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA – 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
74	CARGL	Curva Glicemica breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
83	CURGL	Curva glicemica completa (Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
M25STIM	INSST	Curva Insulinemica (Fino a 5 punti)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	CR
G290 + G90	G290 + G90	CYP2C19*2A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G287+G288+G289+G90	G287+G288+G289+G90	CYP2D6 3A+CYP2D6 4A+CYP2D6 6A Varianti Alleliche Contattare genetica CR per conferma	N.B. Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G287 + G90	G287 + G90	CYP2D6*3A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G288 + G90	G288 + G90	CYP2D6*4A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G289 + G90	G289 + G90	CYP2D6*6A variante allelica - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
<b>D</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
OP370B	DABIB	Dabigatran basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370C	DABI2	Dabigatran dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370	Dabl	Dabigatran dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP330	DDI	D-Dimero	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M13	DHEAS	Deidroepiandrosterone Solfato - DHEA-S - DHEAS Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Delezioni Subtelometriche 1 e 2 MPLA - FISH Telomeri multipli <b>genetica CR per conferma</b>	<b>Contattare</b> Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 32 gg.	CR
M05	ASD	DELTA 4 Androstenedione - ASD - Androstenedione	Pr. T. Rosa corta	max 3 gg.	CR
938	DERMA	Dermatofiti - Miceti - Candida - ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	max 8 gg.	OGLIO-PO
PEMF	pemf	Dermatosi bollosa autoimmune - Profilo (analisi con più esiti: Ab anti BP180, BP210, DESMOGLEINA 1, DESMOGLEINA 3, ENVOPLACHINA, COLLAGENE TIPO VII)	Pr. T. Trasparente alta stretta		CR
DESME	DESME	Desmetilsuccimide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
		Desossipiridinolina - Pylilinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO -SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
M13	DHEAS	DHEA S - DHEAS Solfato - Deidroepiandrosterone Solfato	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
		Dibucaina - Numero di Dibucaina NON SI ESEGUE PIU'			
160	FENI	Difenilidantoina - Dintoina - Fenitoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
167	DIGOS	Digossina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
210	210	Differite anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
M49	VID	Diidrossi VitaminaD - VIT.D3 - 1-25 VITAMINA D - 1-25(OH)2 VIT.D3 Calcitriolo - Calciferolo - N.B. se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 15 gg.	OGLIO-PO
160	FENI	Dintoina - Fenitoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
C48	CATU	Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina – Catecolamine urinarie (Camp. urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	max 15 gg.	OGLIO-PO
METFO	METFO	Dosaggio Metformina	Pr. T. Trasparente alta stretta	15 gg.	OGLIO-PO
G106+G106	Bitest (PROFILO) o G107 (PROFILO)	DOWN - BI TEST (si esegue dalla 14° alla 16° settimana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
910	DREN	Drenaggio esame COLTURALE del liquido per batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
96	96	Droghe d'abuso su urina (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max2 gg.	Lab Sanità Pubblica CR
96S	96s	Droghe d'abuso su sangue (si esegue solo per richieste a scopo legale seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. grigio per drighe in GHIACCIO	max2 gg.	Lab Sanità Pubblica CR
A25	dsDNA	DS DNA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
<b>E</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEG ricerca nelle feci	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
962	CMVRT	Early Antigene CMV - Citomegalovirus Antigene precoce in PCR Real Time	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
231 T	231 T	EBV anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	EBV -Epstein Barr Virus VCA/EBNA/EA (DiaSorin) <b>IgG + IgM</b> VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 T+231 M	EB(PROFILO)o 231(PROFILO)	EBV <b>IgG - IgM</b>		max 3 gg.	CR
231 M	231 M	EBV <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
959	EBVRT	EBV <b>DNA</b> - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
205	GHE	Echinococco Anticorpi - Ghedini-W. Sierodiagnosi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
OP395	OP395	Edoxaban - nome commerciale LIXIANA	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP395B	O395B	Edoxaban basale	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP395C	O395C	Edoxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
507E	ELAST	Elastasi 1 pancreatico fecale	Cont. Feci (no feci diarroiche)	max 2 gg	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Elettroforesi + Proteine Totali	Pr. T. Ruggine alta e stretta +Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 1 gg	OGLIO-PO
T56C	HBAN	Elettroforesi Hb - Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
11	EFTP (PROFILO)	Elettroforesi proteine seriche (Comprende PROTEINE TOTALI)	Pr. T. Ruggine alta e stretta +Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 2 gg	OGLIO-PO
407	ELUR	Elettroforesi proteine urinarie (Comprende PROTEINURIA)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 3 gg.	OGLIO-PO
31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Elettroliti serici - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Elettroliti urinari - NA (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) URINARI (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
OP390	APIX	ELIQUIS(NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
OP390B	APIXB	ELIQUIS(NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)BASALE: Prima della somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP390C	APIX2	ELIQUIS(NOME COMMERCIALE FARMACO PER APIXABAN)dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
296	<b>297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)</b>	EMA - Endomisio ricerca anticorpi - Anti ENDOMISIOCARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
900	EMOC	Emocoltura - PER UNA STESSA RICHIESTA, CARICARE PIU' VOLTE IL CODICE (COME PREVISTO DAL PROTOCOLLO) SCEGLIENDO OGNI VOLTA NELLA TENDINA DEI MATERIALI LA TIPOLOGIA DEI FLACONI	Flaconi EMOCOLTURA	5 gg	OGLIO-PO
900P	1PAE	Emocoltura PEDIATRICA –PRELEVARE 1 FLACONE PER AEROBI DI SANGUE PERIFERICO	Flacone EMOCOLTURA pediatrica ROSA PER AEROBI	5 gg	CR
989	EMOBK	Emocoltura per BK	Flacone EMO BK_Flac. Lytic ROSSO	max 50 gg.	CR
G580	g580	Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - Mutazione HFE per Emocromatosi <b>N.B. Contattare Genetica CR per conferma - CONSENSO</b>	Pr. T. Rosa bassa	max 6 gg.	CR
300E + 300F	300R (PROFILO)	Emocromo (con formula) - Emocromocitometrico con formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
300U	CBC	Emocromo (senza formula) - Emocromocitometrico senza formula	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	20 minuti	OGLIO-PO
625	emoar	Emogasanalisi Arteriosa - pH Arterioso(Mantenere In ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	Emogasanalisi Capillare - pH Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	Emogasanalisi Venosa - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Emogasanalisi Venosa PER ESTERNI - pH venoso (Mantenere in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
T56A	HBA2	Emoglobina A2 - HbA2	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T56B	HBF	Emoglobina F - HbF	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T56C	HBAN	Emoglobine anomale - Varianti emoglobiniche - Elettroforesi Emoglobina	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T59	HBG	Emoglobina Glicosilata - Hb1Ac - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
T318	ABORh	Emogruppo - Gruppo Sanguigno AB0 Rh	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34	ENAP (PROFILO)	ENA - Profilo per il caricamento di tutti gli ENA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 17 gg.	CR
A33	cenp	ENA anti - CENP	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
A34	iston	ENA anti - Istoni	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A32	a_Jo1	ENA anti - Jo1	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A28	a_RNP	ENA anti - RNP	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A29	a_SSa	ENA anti - SSa	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A30	SSb	ENA anti - SSb	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A31	SCL70	ENA anti - SCL70	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A27	sm	ENA anti - SM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
A26	ENA	ENA <b>screening</b> Anticorpi anti-Antig. Nucl. Estraibili	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
296	<b>297DI</b> (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Endomisio ricerca anticorpi - EMA - Anti ENDOMISIO. <b>CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
M43	ENO	Enolasi - NSE	Pr. T. Rosso alta stretta	max 8 gg.	CR
213	AMEBA	Entamoeba h. anticorpi - AMEBA Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
509A	509A	Entamoeba histolytica - Antigeni fecali	Contenitore FECl	max 2 gg.	CR
929V	TRENT	Enterococchi VRE Tampone rettale	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
OPFEO	feo	Eosinofili nelle feci	Contenitore FECl	max 4 gg.	OGLIO-PO
352	EPABP	Eparina LMWH a basso peso molecolare	Pr. T. Azzurro bassa	max 4 gg.	OGLIO-PO
T245	MAG	Epatite A Anticorpi <b>IgG- HAV IgG</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T246	MA	Epatite A Anticorpi <b>IgM (caricare questo codice se non meglio specificato)</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Epatite B - Anticorpi HBV - Markers Epatite BN.B.caricare questo se non specificato + HBe)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Epatite B + HBe <b>(Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Epatite B DNA - HBV DNA - Markers B DNA - IBRIDAZIONE PREVIA PCR	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T227	MC	Epatite C Anticorpi - HCV - Markers Epatite C	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212	AU	Epatite Antigene AU - HBsAg - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	Epatite C - RNA QUALITATIVO <b>N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	Epatite C - RNA <b>QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA - N.B. Caricare questo codice per richieste generiche di Epatite C RNA</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	Epatite C (HCV) TIPIZZAZIONE GENOMICA - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T131	HDV	Epatite DELTA (D) - Anticorpi totali	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
T132	DIGM	Epatite DELTA (D) Anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
T133	HDVAg	Epatite DELTA (D) <b>ANTIGENE</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
PV23	HDVRN	Epatite DELTA (HDV) - Ricerca <b>acidi nucleici</b> - PCR per <b>RNA</b>	Pr. T. Rosso alta stretta	max 21 gg.	PV
925	925	EPEC - E.Coli Enteropatogeni - ricerca nelle feci	Contenitore STERILE per feci	max 4 gg.	CR
925	925	E.Coli Enteropatogeni - EPEC - ricerca su feci	Contenitore STERILE per feci	max 4 gg.	CR
159	EPO	EPO - Eritropoietina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Anticorpi VCA/EBNA/EA (DiaSorin) <b>IgG + IgM</b> VCA anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
959	EBVRT	Epstein Barr Virus <b>DNA</b> - quantificazione del DNA dell'Epstein Barr Virus	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco (per neonati nei primi tre giorni di vita si esegue anche su urina)	max 8 gg.	CR
231 T	231 T	Epstein Barr Virus anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Epstein Barr Virus <b>IgG - IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 M	231 M	Epstein Barr Virus <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
159	EPO	Eritropoietina - EPO	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
92	CALCO	Esame chimico del calcolo urinario - Calcolo Urinario	Contenitore adeguato	max 3 gg.	OGLIO-PO
938	DERMA	Esame micologico su capelli, unghie, squame cutanee- Miceti, Dermatofiti	Contenitore STERILE	max 8 gg.	OGLIO-PO
940	GRAM	Esame microscopico - colorazione di Gram	Vetrino	max 1 gg.	CR
929E	TESBL	ESBL - Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
909	ES	Escreato Colturale	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
G519+G90	G519 + G90	Esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - Contattare genetica CR per conferma	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 21 gg.	CR
<b>G540+G90</b>	<b>G540 + G90</b>	<b>Mutazione V617F- Jak 2 -Contattare genetica CR per conferma</b>	<b>Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)</b>	<b>max 21 gg.</b>	<b>CR</b>
908	TAU	Essudato auricolare Colturale (specificare all'inserimento se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
921	TCONG	Essudato Congiuntivale Colturale(verrà richiesto di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
912	TFAR	Essudato faringeo esame colturale - Tampone faringeo	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
918V + 931N	TAVAG + TRICO	Essudato vaginale Colturale	Tampone con terreno trasporto + 2 vetrini per striscio vaginale da tampone secco + tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto trichosel (brodo marrone)	max 4 gg.	CR
M14	17BE2	Estradiolo - 17-beta-E2 - Estrogeni - 17 beta Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M14	17BE2	Estrogeni - 17-beta-E2 - 17 beta Estradiolo - Estradiolo	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
94 + 95	95P (PROFILO)	Etanolo richiesta per accertamenti MEDICO LEGALI <b>l'apposito protocollo</b>	<b>seguire</b> 2 Pr. T. Grigio - firmate		ASL CR
94	ALCOL	Etanolo richiesto a scopo clinico (seguire l'apposito protocollo)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max.1g	OGLIO-PO
163	ETO	Etosuccimide	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
C82	C82	Everolimus	Pr. T. Viola (K3 EDTA)		BS
<b>F</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
		F1+2 R DISABILITATO NON SI ESEGUE			
A24	ANA	FAN - ANA - Anti Nucleo - Fattore Antinucleo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg	CR
355	FVW	Fattore di Von Willebrand - Fattore di V W	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
340	F II	Fattore II coagulativo - Protrombina - CONSENSO	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
344	FIX	Fattore IX coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
341	FV	Fattore V coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
G56	MFV (PROFILO)	Fattore V Leiden - <b>Mutazioni Genetiche FV</b> - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
342	FVII	Fattore VII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
343	FVIII	Fattore VIII coagulativo	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 17 gg.	CR
345	FX	Fattore X coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
346	FXI	Fattore XI coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
347	FXII	Fattore XII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
349	FXIII	Fattore XIII coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
A24	ANA	Fattore Antinucleo - ANA - Anti Nucleo - FAN	Pr. T. Azzurro bassa	max 13 gg	CR
M15	m15	Fattore di crescita insulino simile 1 - IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	max 15 gg.	CR
201	RF	Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - RF - Reuma test	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Fattore Reumatoide su liquidi cavitari - RF su liquidi	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
M20	FBHCG	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (per tumore)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 16 gg.	CR
G103	g103	FbetaHCG - FHCG - Free Beta HCG (in gravidanza)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
66	SID	Fe - Sideremia - Ferro	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
925	925	Feci ricerca E.Coli Enteropatogeni (EPEC)	Contenitore STERILE per feci	max 4 gg.	CR
510	NORO	Feci ricerca NOROVIRUS	Contenitore STERILE per FECI	max 4 gg.	CR
FELB	FELB	Felbamato	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
160	FENI	Fenitoina - Dintoina - Difenilidantoina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
161	FENO	Fenobarbital - Barbiturici	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
C19	fen	Fenolo (si esegue su urina)	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	max 8 gg.	BS
T224	FER	Ferritina	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	1 g.	CR
66	SID	Ferro - Sideremia - Fe	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OP327	Fib	Fibrinogeno	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G322Z	g322z	Fibrosi Cistica - Indagine GENETICA mutazioni, test primo livello	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 23 gg.	CR
41	CREA	Filtrato Glomerulare Calcolato - GFR (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
G307	g307	FISH per t(11;14)(q13;q32) - <b>Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 21 gg.	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	FISH Telomeri multipli - Indagine GENETICA - MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - <b>Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 32 gg.	CR
170	TACRO	FK 506 - Tacrolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	max 5 gg.	OGLIO-PO
M47	FOLIC	Folati - Acido Folico	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
OPFLC	fl	Formula leucocitaria nei LIQUIDI CAVITARI	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
52	ALP	Fosfatasi Alcalina - ALP	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
155	OSSEA	Fosfatasi Alcalina Ossea - Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo	Pr. T. Rosso Grossa	max 5 gg.	CR
26	POUR	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESI)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
26F	26F	Fosfaturia - Fosforo nelle urine (Campione spot)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
323+324 324M+338 338M	FOSF (PROFILO)	Fosfolipidi - Anti Fosfolipidi (Lupus - ACA - B2 Glicoprot.)	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
25	P	Fosforo - P	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
G60Z	g60z	FRAXA test di primo livello - GENETICA - CONSENSO	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
M32	PSA	FREE PSA - PSA LIBERO - FPSA - Caricare solo PSA (N.B. Il libero verrà eseguito automaticamente in base alla significatività del PSA)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M16	FSH	FSH sierico - Ormone Follicolo Stimolante	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M17	FT3	FT3 - Triiodotironina <b>N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario</b>	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M18	FT4	FT4 - Tetraiodotironina Libera <b>N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario</b>	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
209A	209A	FTA - ABS N.B. Caricare codice <b>VTF</b> screening LUE	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
938	DERMA	Funghi - Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	max 8 gg.	CR
365	365	Funzionalità piastrinica PFA100 - <b>IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.</b>	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	in giornata	CR
<b>G</b>	<a href="#">Torna a Pag. 1.</a>				
T65	G6PDH	G6PDH - GLUCOSIO 6 PH DEIDROGENASI (solo giovedì)	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	max 5 gg.	CR
GABA	GABA	Gabapentin	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
M55	GAD	GAD - Anti GAD - Anti DECARBOSSILASI GLUTAMMICO	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 21gg.	BS
	DISABILITATO	Galattosemia - NON SI ESEGUE			
C52	C52	Galattomannano (vanno bene sia BAL sia siero)	Pr. Rossa grande per BS	max 15 gg.	BS
35	GGT	Gamma Glutamil Trasferasi - GammaGT - GGT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
35	GGT	GammaGT - Gamma Glutamil Trasferasi - GGT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
625	emoar	Gasanalisi Arteriosa- pH Arterioso <b>(in ghiaccio)</b>	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	Gasanalisi Venosa <b>(in ghiaccio)</b>	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
623	EMOGA	Gasanalisi Venosa per esterni <b>(in ghiaccio)</b>	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
M19	GASTR	GASTRINA - Gastrina 34 e Gastrina 17 - Gastrinemia GBM - Anti-Membrana Bas. Glomerul. (NON SI ESEGUE Più)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 15 gg.	MI
172	NGAL	Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina - NGAL	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 6 gg.	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOMA HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - Genotipo HCV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	GENOMA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 16 gg.	CR
T07A+T011	T07 (PROFILO)	GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	GENOTIPO HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 16 gg.	CR
291P	GENP	Gentamicina PICCO (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
291V	GENV	Gentamicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
929S	929S	Germi SENTINELLA ricerca colonizzazione	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
41	CREA	GFR - Filtrato Glomerulare Calcolato (Caricare cod. 41 Creatinina)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
35	GGT	GGT - GammaGT - Gamma Glutamyl Trasferrasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
M21	HGH	GH - HGH - Ormone Somatotropo	Pr. T. Trasparente altaStretta (acqua e ghiaccio)	max 5 gg.	CR
205	GHE	Ghedini-W. Sierodiagnosi - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
507A	Giard	Giardia duodenalis - antigeni nelle feci	Contenitore FECL	max 3 gg.	CR
507A	Giard	Giardia ricerca nelle feci	Contenitore FECL	max 3 gg.	CR
M08	CA199	GICA - CA 19-9	Pr. T. Rosso alta stretta	max 3 gg.	CR
295A+295G	<b>297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)</b>	Gliadina anticorpi IgG - IgA <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
295A	<b>297DI (PROFILO297D+214IGA) o 297M (PROFILO297+214IGA)</b>	Gliadina <b>IgA</b> - Anti Gliadina <b>IgA</b> - AGA <b>IgA</b> - Anti glutine <b>IgA</b> <b>N.B. CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
295G	<b>297DI (PROFILO 297D + 214IGA) o 297M (PROFILO 297 + 214IGA)</b>	Gliadina <b>IgG</b> - Anti Gliadina <b>IgG</b> - AGA <b>IgG</b> - Anti glutine <b>IgG</b> <b>N.B.CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o 297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
2	GLU	Glicemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
2L	glupl	Glucosio su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
75G	75G	Glicemia Curva - screening in GRAVIDANDA <b>N.B. SI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'</b>	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
74	CARGL	Glicemia Curva breve (Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
83	CURGL	Glicemia Curva completa (Prevede 5 prelievi specificare i tempi al caricamento)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OP75	GLPO	Glicemia POST PRANDIALE	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
410	GLICA	Glicosuria su urina - Glucosio su urina	Contenit. URINA (Camp. 24 ore)	in giornata	OGLIO-PO
605	LIQUO	Glicorrachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
T65	G6PDH	Glucosio 6 Fosfato Deidrogenasi - G6PDH ( <b>prenotabile solo per il GIOVEDI'</b> )	Pr. T. Lilla trasparente (CT CR)	in giornata	CR
44	GOT	Glutammico Ossalacetico Transaminasi - GOT - AST - Transaminasi GOT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
45	GPT	Glutammico Piruvico Transaminasi - GPT - ALT - Transaminasi GPT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
150	BHCG	Gonadotropina Corionica - Beta HCG - HCG	Pr. T. Trasparente alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
228	CLAM	Gonococco e Chlamydia su MATERIALI VARI. Specificare il materiale al caricamento	Contenitori idonei	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su CERVICESpecificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su Essudato CONGIUNTIVALE. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su LIQUIDO SPERMATICO. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca SU URETRA. Specificare il materiale al caricamento	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Gonococco esame colturale Ricerca su URINA. Specificare il materiale al caricamento	Contenitore sterile	max 4 gg.	CR
44	GOT	GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi - Transaminasi GOT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
45	GPT	GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi - Transaminasi GPT	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
258	BART	Graffio di gatto - BARTONELLA henselae - anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
215	GRAV	Gravindex - Test di Gravidanza	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
T318	ABORh	GRUPPO SANGUIGNO AB0 Rh - EMOGRUPPO	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
<b>H</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
945	H1N1	H1N1 ricerca virus influenza	Tamponi appositi da RICHIEDERE AL LABORATORIO	Max 2 gg	CR
T245	MAG	HAV IgG - Epatite A Anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
T246	MA	HAV <b>IgM</b> - Epatite A Anticorpi IgM - Markers Epatite A IgM - N.B. <b>caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T59	GLIC	Hb Glicosilata - HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
T59	GLIC	Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - HBG - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
T56A	HBA2	HbA2 - Emoglobina A2	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T214	HBcAb	HBC - CORE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T217	HBCM	Hbc Ab IgM - ANTI CORE IgM - Anti Hbc IgM - Core IgM	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T214	HBcAb	HBcAb - Anti CORE - Anti HBc	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T216	HBEAB	HBeAb - Anti Antigene E - Anti E - Anti Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T215	HBeAg	HBeAg - Antigene E - Antigene Hbe	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T56B	HBF	HbF - Emoglobina F	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO
T59	GLIC	HBG - Hb1Ac - Emoglobina Glicosilata - Hb Glicosilata	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
T213	HBsAb	HBsAb - Anti Antigene di superficie - Anti AU - Anti HBsAg	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213	HBsAb	HbsAb Titolo Anticorpale - Titolo Anti AU - Titolo Anti Hbs	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212	AU	HBsAg - Antigene AU - AU	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	HBV - Epatite B comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)N.B. Caricare questo codice se non viene esplicitamente richiesto + HBE	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	HBV + Hbe ( <b>M. Epatite B Completo, caricare solo se specificato MB+HBE</b> )	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T08A +T01+T0C	T08 (PROFILO)	HBV SEQUENZIAMENTO - HBV RESISTENZA AI FARMACI SEQUENZIAMENTO	2 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	HBV-DNA QUANTITATIVO IN REAL-TIME	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
150	BHCG	HCG - Beta HCG - Gonadotropina Corionica	Pr. T. Trasparente alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
T07A+T011	T07 (PROFILO)	HCV GENOTIPO - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	HCV RNA ANALISI <b>QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA (caricare questo codice per richieste generiche di HCV RNA</b>	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	HCV RNA QUALITATIVO <b>N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06</b>	3 Pr.T. Rosa alta (CT-CR)	max 12 gg.	CR
16	HDL	HDL Colesterolo	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
PV23	HDVRN	HDV RNA - Virus epatite delta acidi nucleici	Pr. T. Rosso alta stretta	max 21 gg.	PV
262	HELIF	Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - HPSA (ricerca nelle feci)	Contenitore FECl	max 8 gg.	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	Herpes Simplex Virus (1,2) anticorpi - HSV2 <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230G	HSVG	Herpes Simplex Virus anticorpi <b>IgG- HSV2 IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230M	HSVM	Herpes Simplex Virus anticorpi <b>IgM- HSV2 IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Herpes Zoster anticorpi IgG + IgM	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
232G	VARIG	Herpes Zoster anticorpi <b>IgG</b> - Varicella zoster anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
232M	VARIM	Herpes Zoster <b>IgM</b> - Varicella Zoster anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
M21	HGH	HGH - Ormone Somatotropo - GH	Pr. T. Rossa alta stretta (acqua e ghiaccio)	max 5 gg.	CR
T223	HIV	HIV Anticorpi HIV 1-2 - HTLVIII	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	HIV GENOTIPO - HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 16 gg.	CR
T03A+T011	T03 (PROFILO)	HIV RNA - ANALISI QUALITATIVA DI HIV RNA (previa PCR) N.B. caricare QUANTITATIVO codiceT04	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T04A+T011	T04 (PROFILO)	HIV RNA - ANALISI <b>QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA</b> DI HIV RNA (previa PCR)N.B. <b>caricare questo codice per richieste generiche di HIV RNA)</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T09A+T00+T0B+T0A+T011	T09 (PROFILO)	HIV SEQUENZIAMENTO - TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV - HIV RNA TEST DI RESISTENZA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 16 gg.	CR
262	HELIF	HPSA - Helicobacter Pylori - Antigene Helicobacter Pylori - nelle feci(ricerca nelle feci)	Contenitore FECl	max 8 gg.	CR
230G + 230M	HERP (PROFILO) o 230n (PROFILO)	HSV2 - Herpes Simplex Virus (1, 2) anticorpi <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230G	HSVG	HSV2 <b>IgG</b> - Herpes Simplex <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
230M	HSVM	HSV2 <b>IgM</b> - Herpes Simplex <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
M23	HTg	HTg - Tireoglobulina - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
212	HTLV	HTLV I – IIN.B.Caricare questo codice solo se ben specificata la descrizione altrimenti caricare il codice HIV	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	max 7 gg.	CR
T223	HIV	HTLVIII - Anticorpi HIV 1-2 - HIV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR

## I - J

[Torna a Pag. 1.](#)

		IA2 - Anti IA2 - Anti Enzima Tirosis Fosfatasi <b>NON SI ESEGUE PIU'</b>			
T69	CIC	ICC - Immunocomplessi circolanti - CIC	Pr. T. Giallo rosso bassa	max 7 gg.	OGLIO-PO
		Idrossiprolinuria - Pylilinks-D - Desossipiridinolina (Urina campione) DISABILITATO –SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod. M22			
133	IGET	Ig E - IgE totali - PRIST	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	OGLIO-PO
799	799	Ig E Specifiche - RAST (L'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1 pagina 53</b> . Se non precisamente richiedi gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione.)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
M15	m15	IG F1 - Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor 1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	max 15 gg.	CR
IG	IG (PROFILO)	Ig G + Ig A + Ig M - Immunoglobuline G A M	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214IGA	IGA	IgA - Immunoglobuline A	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214AL	igasi	IgA su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
214IGG	IGG	IgG - Immunoglobuline G	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214IGM	IGM	IgM - Immunoglobuline M	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
151	IMMUS	IMF - Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
152	IMMUR	IMF - Immunofissazione urine - Ricerca Proteina di Bence Jones	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	max 3 gg.	OGLIO-PO
T69	CIC	Immunocomplessi circolanti - CIC - ICC	Pr. T. Giallo rosso bassa	max 7 gg.	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunolettroforesi siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunolettroforesi urina	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 3 gg.	OGLIO-PO
151	IMMUS	Immunofissazione siero	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
152	IMMUR	Immunofissazione urine	Contenit. URINA (Camp. 24 ORE o camp. estemp.)	max 3 gg.	OGLIO-PO
214IGA	IGA	Immunoglobuline A - IgA	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214IGG	IGG	Immunoglobuline G - IgG	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214IGM	IGM	Immunoglobuline M - IgM	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
214IGA+214IGG+214IGM	IG (PROFILO)	Immunoglobuline G A M - IgG + IgA + IgM	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
945	H1N1	Influenza H1N1 ricerca virus	Tamponi appositi da RICHIEDERE AL LABORATORIO	Max 2 gg	CR
C41	c41	Inibitore C1	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 16 gg.	OGLIO-PO
364	INF8	Inibitore fattore VIII (Conservare in ghiaccio)	Pr. T. Azzurro con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 17 gg.	CR
OP331	QUI	INR - Tempo di protrombina - Quick -Tempo di Quick - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331T	TERAP	INR PER TERPIA - <b>N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI</b>	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
M15	m15	Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Somatomedina C - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	max 15 gg.	CR
M25	INSUL	Insulina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
C56	C56	Insulina anticorpi (anticorpi anti insulina)	Pr. T. Rosso per Milano	max 21 gg.	Mi San Raffaele
M25STIM	INSST	Insulina Curva (Fino a 5 punti)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
IL6	IL6	Interleuchina 6	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	CR
AAB	AAB (PROFILO)	Isoanticorpi Anti A B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76A	TITA	Isoanticorpi Anti A	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
T76B	TITB	Isoanticorpi Anti B	Pr. T. Ruggine Grossa (+ bollino)	1 g.	POOP-CT
53	CKMBM	Isoenzimi CK - CKM - CKMB massa	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
G519+G90	G519 + G90	JAK2 esone 12 – Sequenza JAK2 esone 12 - <b>NB. Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 21 gg.	CR
G111+G112+G121+G114	G326(PROFILO)	MUTAZIONE BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
G111+G112+G121+G114	G326(PROFILO)	BRCA1 sequenza esoni gruppo 1 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR
G121 + G111	G111 + G121	BRCA2 sequenza esoni gruppo 2 - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR
G121 + G111	G111 + G121	MUTAZIONE BRCA2 sequenza esoni gruppo 1 - N.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR
<b>K-L</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
OP31K	OP31K	K - Potassio - Potassiemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
33	KUR	K urinario - Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
33F	33F	K urinario spot - Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
153	KL	Kappa - Lambda Catene leggere libere free <b>siero</b> (Quantitativo)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
G270	g270	BRCA1 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
G270	g270	MLPA BRCA1 - Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPAN.B. contattare prima genetica CR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
G270	g270	Riaranggiamenti in BRCA1 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
G271	g271	BRCA2 mediante MLPA - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
G271	g271	MLPA BRCA2 - Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
G271	g271	Riaranggiamenti in BRCA2 mediante MLPA - <b>N.B. contattare prima genetica CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 28 gg.	CR
407KL	KLUR	KAPPA e LAMBDA - Catene Leggere Libere nelle Urine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. O 24 h)	max 3 gg.	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Keppra - Levetiracetam	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
C78	C78	Isavuconazolo	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	max 25 gg.	BS
323	LAC	LAC - Lupus anticoagulant - Lupus	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
LACO	laco	Lacosamide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 14 gg.	OGLIO-PO
153	KL	LAMBDA - KAPPA Catene leggere libere free <b>siero</b> (Quantitativo)	Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
407KL	KLUR	LAMBDA e KAPPA Catene Leggere Libere nelleUrine (Quantitativo)	Contenit. URINA (Camp. estemp. o 24 h)	max 3 gg.	OGLIO-PO
LAMO	LAMO	Lamotrigina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
OP22	ACLAT	Lattato - Acido Lattico	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
919	919	Lavaggio Broncoalveolare Colturaleper ricerca di batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
49	LDH	LDH - Latticodeidrogenasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
49AS	ldhas	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido ascitico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
49PL	ldhpl	LDH - Latticodeidrogenasi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	LDH su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
18	LDL	LDL - Colesterolo LDL	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
263	LEGIO	Legionella pneumophyla - Legionella Antigene nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 2 gg.	CR
C66	C66	Legionella anticorpi <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Rossa per BS	max 15 gg.	BS
512	512	Leishmania anticorpi <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 7 gg.	CR
207	LEPTO	Leptospire - anticorpi <b>IgM</b> - Petit Martin	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
499	leufe	Leucociti nelle feci	Contenitore FECE	1 g.	OGLIO-PO
KEPPRA	KEP	Levetiracetam - Keppra	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
		LH - dosaggio nelle urine delle 24 ore NON SI ESEGUE			
M27	LH	LH - Ormone Luteinizzante	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
29	LI	LI - Litiemia - Litio	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	OGLIO-PO
LINEZ	linez	Linezolid - dosaggio antibiotico	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	30 gg	Mi Niguarda
935		LINFONODO AGOASPIRATO PER MICRO			CR
107	LIP	Lipasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
107C	107C	Lipasi su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
107L	lipdr	Lipasi su liquidi pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento)	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
LPAF	lpaf	Liquidi cavitari Alfa Feto Proteine - AF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
OPLPAM	lpam	Liquidi Cavitari Amilasi (DISABILITATO)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC15	lpc15	Liquidi Cavitari CA 15-3	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC19	lpc19	Liquidi Cavitari CA 19-9 - GICA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
LPC125	lpc12	Liquidi Cavitari CA-125	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
OPLCAVI	lcavi	Liquidi Cavitari chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	Liquidi Cavitari Fattore Reumatoide - RF	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPFLC	fl	LIQUIDI CAVITARI Formula leucocitaria	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	max 2 gg.	OGLIO-PO
OPLPLDH	lpldh	Liquidi Cavitari LDH	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
<b>OPLPPRO</b>	lppro	Liquidi Cavitari Proteine	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
OPLASC	lasc	Liquido Ascitico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquido Cefalo rachidiano chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquido Cefalo rachidiano esame colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	max 4 gg.	CR
910	DREN	Liquido di drenaggio esame COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
LPCEA	lpcea	Liquido Pleurico CEA	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	max 4 gg.	CR
OPLPL	lpl	Liquido Pleurico chimico fisico (comprende dosaggio Proteine e LDH)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
930	930	Liquidi biologici vari esame colturale (richiede il materiale al caricamento) per ricerca batteri e miceti. Per eventuale ricerca anche di ANAEROBI ricaricare lo stesso codice e scegliere il relativo materiale contrassegnat con ANA	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
612	SPERM	Liquido Seminale - Spermogramma PRENOTARE AL NUM. 0375281575	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
OP612A	SpeA	Liquido seminale Anti Spermatozoi ADESI PRENOTARE AL NUM. 0375281575	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
914	914	Liquido Seminale Colturale	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
174A	LSI	Liquido Sinoviale chimico fisico (si esegue microscopico del sedimento)	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
605	LIQUO	Liquor chimico fisico (comprende dosaggio Protidorrachia, Glicorrachia, Albumina, Conteggio e morfologia cellule)	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
936	LIQ	Liquor Colturale per ricerca batteri e miceti	Provetta STERILE	max 4 gg.	CR
936P	LIQPA	Liquor Esame in biologia molecolare Virus-Batteri-Funghi. Panel Biofire	Provetta STERILE	max 4 gg.	CR
29	LI	Litiemia - Litio - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	OGLIO-PO
29	LI	Litio - Litiemia - LI	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	OGLIO-PO
		LIXIANA - vedi Edoxaban			
A36	a_LKM	LKM - LKM A - Anti LKM - Anticorpi Anti Microsomi epatici renali	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
209A	209A	LUE - RW (Wasserman) - VDRL - Sifilide. <b>Si esegue uno screening per sifilide</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
216	LUEM	Lue anticorpi <b>IgM</b> - Sifilide <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
257	FTA	Lue anticorpi <b>IgG</b> - Sifilide <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
255	RPR	Lue anticorpi <b>R.P.R.</b> - Sifilide <b>R.P.R.</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
256	TPPA	Lue anticorpi <b>TPPA</b> - Sifilide <b>TPPA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
323	LAC	Lupus - Lupus anticoagulant - LAC	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 17 gg.	CR
211G	LYG	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
211M	LYM	LYME Borrelia - Sierodiagnosi Borrelia - Anti Borrelia Anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
<b>M</b>	<a href="#">Torna a Pag. 1.</a>				
T246	MA	MA - Markers Epatite A <b>IgM</b> - Epatite A Anticorpi IgM - HAV IgM ( <b>NB. caricare questo codice se non specificato IgG o IgM</b> )	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T245	MAG	MA <b>IgG</b> - Markers Epatite A <b>IgG</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
105	MG	Magnesiemia - Mg Siero - Magnesio su siero	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
106	MGUR	Magnesiuria - Mg Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
106F	106F	Magnesio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
309NB.caricare profilo "MAL"	MAL	Malaria - Plasmodio della Malaria - Parassita Malaria ricerca microscopica <b>NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni</b>	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
310NB.caricare profilo "MAL"	MALAg	Malaria - ricerca antigeni HPR2 - <b>NB. Caricare il cod. "MAL" profilo per microscopico e ricerca antigeni</b>	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
211G	LYG	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
211M	LYM	Malattia di Lyme - Borrelia - anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
	NON SI ESEGUE	MANTOUX (NON SI ESEGUE)			
C81	mang	Manganese	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg.	BS
G7 + G8	MACRO (PROFILO)	Mappa Cromosomica - Cariotipo (su sangue periferico)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
G05 + G04 + G46	CARMID (PROFILO) o G88 (PROFILO)	Mappa cromosomica su prelievo midollare - Cariotipo midollare	Contenitore adeguato	max 23 gg.	CR
T11A + T01	HBVDNA (PROFILO) o T11 (PROFILO)	Markers B DNA - Epatite B DNA - HBV DNA	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T245	MAG	Markers Epatite A <b>IgG</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T246	MA	Markers Epatite A <b>IgM (caricare questo codice per anticorpi IgM se non meglio specificato)</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	Markers Epatite B - HBV - N.B. caricare questo codice quando non viene specificato + HBE - Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	Markers Epatite B + HBe ( <b>Completo, caricare solo se specificato MB+HBE</b> )	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T227	MC	Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T132	DIGM	Markers Epatite Delta (D) Anticorp <b>IgM</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
T131+T132	MD (PROFILO)	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>IgM e TOTALI</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 23 gg.	CR
T131	HDV	Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
905	MAIC	Materiale da intervento chirurgico, ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
T212+T213+T214	MB (PROFILO)	MB - Markers Epatite B N.B. caricare questo codice quando non specificatamente richiesto + HBE Comprende: Antigene AU (HBsAg + Anticorpi Anti-Antigene di superficie (HBsAb) + Anticorpi Anti CORE (HBcAb)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213+T213+T214+T215+T216	MB-HBE (PROFILO)	MB + Hbe (Completo, caricare solo se specificato MB+HBE)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T227	MC	MC - Markers Epatite C - Anticorpi HCV	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
	NON SI ESEGUE	MCA (NON SI ESEGUE)			
T131+T132	MD (PROFILO)	MD - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI e IgM</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 23 gg.	CR
T132	DIGM	MD IgM - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 15 gg.	CR
T131	HDV	MD Totali - Markers Epatite Delta (D) Anticorpi <b>TOTALI</b>		max 15 gg.	CR
C24	hg	Mercurio su Plasma	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg.	BS
C25	hgu	Mercurio urinario	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
METHB	METHB	Meta Hb - METAEMOGLOBINA (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
C36	TTMUC	Metaboliti urinari del benzene - Acido T,T-Muconico benzene	Contenitore URINE (campione fine Turno Lavoro o esposizione conservare in frigorifero)	max 20 gg.	BS
METHB	METHB	Metaemoglobina - Meta Hb (si esegue con Gas Analisi)	Siringa apposita per Emogas.	in giornata	OGLIO-PO
C48M	META	Metanefrine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	max 15 gg.	OGLIO-PO
C50	OXCA	Meta-Oxcarbapazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
175	METO	Metatressato / Methotrexate (farmaco)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	CR
METFO	METFO	Metformina Dosaggio	Pr. T. Trasparente alta stretta	15 gg.	OGLIO-PO
METOS	METOS	Metosuccimide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
105	MG	Mg - Magnesio su Siero	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
106	MGUR	Mg - Magnesio su Urine (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
106F	106F	Mg - Magnesio su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
938	DERMA	Miceti - Dermatofiti - Spore Fungine - Funghi - Candida. Ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	max 8 gg.	OGLIO-PO
225	FUNG	Miceti anticorpi – Precipitine - Anticorpi Anti Miceti su Siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
958C+988M+958B	960 (PROFILO BK)	Micobatteri Ricerca colturale e microscopico - BK (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE TAPPO A VITE	max 40 gg.	CR
953N	GEN	Micobatteri ricerca con sonda genetica (Verrà richiesto all'inserimento il materiale)	Contenitore STERILE	max 10 gg,	CR
404	MA	Microalbuminuria (Campione urina estemporaneo)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
G62	G62	Microdelezioni del cromosoma Y	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 23 gg.	CR
954	954	MIDOLLO OSSEO. Colturale per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
954	954	MIELOCOLTURA, esame COLTURALE per ricerca di batteri e miceti	????Flacone emocoltura		CR
54	MIOG	Mioglobina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
		MLH1, MSH2, MSH6, geni cancro del colon non poliposico <b>(Contattare direttamente Genetica CR 5217)</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 34 gg.	CR
gG296+G90	g296+G90	MLPA PWA - Prader Willi esame genetico - <b>N.B. contattare GENETICA CR</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
267	267V	Monkeypox - vaiolo delle scimmie	T. faringeo - T. vescicole	max 7 gg.	CR
231 T+231 M	EB (PROFILO) o 231 (PROFILO)	Mono test - Mononucleosi – Epstein Barr Virus anticorpi - EBV <b>IgG + IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 T	231 T	Mono test <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 M	231 M	Mono test <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
MICARB	MICARB	Monoidrossicarbamazepina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
231 T+231 M	EB (PROFILO)	Mononucleosi <b>IgG e IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR
231 T	231 T	Mononucleosi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
231 M	231 M	Mononucleosi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
233	MORB	Morbillo - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
G3	g3	Mosaicismo Liquido amniotico <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
G46	g46	Mosaicismo Midollo Osseo <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
G9	g9	Mosaicismo Sangue Intero <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	MPLA Delezioni Subtelometriche 1 e 2 - FISH Telomeri multipli <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 32 gg.	CR
924N	PM	MRSA Esame colturale per ricerca Staphilococcus meticillino resistente	Tampone con terreno trasporto	max 2 gg.	CR
G57	G57	MTHFR - Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G77	G77	MTRR - Mutazioni Genetiche	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
241	AAG	Mucoproteine - Alfa1 glicoproteina acida	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
G57	G57	Mutazione Genetiche Omocisteina - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G580	g580	Mutazione HFE per Emocromatosi - Emocromatosi idiopatica Analisi delle mutazioni del DNA - <b>N.B. contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 6 gg.	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII - Protrombina	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G56	MFV (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FV - Fattore V Leiden	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G80	G80	Mutazioni genetiche CBS	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche FII	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G77	G77	Mutazioni Genetiche MTRR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
G50+G51	MFII (PROFILO)	Mutazioni Genetiche Protrombina - Mutazione Fattore II	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
G540+G90	G540 + G90	Mutazione V617F - Jak 2 - <b>Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 21 gg.	CR
226G	226G	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
226M	226M	Mycoplasma pneumoniae - anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
932	932	Mycoplasma Ricerca colturale su MATERIALE DIVERSO (Al caricamento verrà richiesto il materiale. Non si esegue su vagina ma su cervice)	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)	max 4 gg.	CR
932	932	Mycoplasma Ureaplasma ricerca colturale su CERVICE (Al caricamento specificare il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)	max 4 gg.	CR
932	932	Mycoplasma Ureaplasma Ricerca colturale su MATERIALI VARI (Al caricamento specificare il materiale. Non si esegue su vagina ma su cervice)	Contenitore STERILE adeguato	max 4 gg.	CR
932	932	Mycoplasma Ureaplasma ricerca colturale su URETRA (Al caricamento scegliere il materiale "URETRALE")	Tampone secco + contenitore STERILE adeguato (brodino R1 per micoplasmi)	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>N</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
31N	NA	Na - Sodio - Sodiemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESIS	in giornata	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
31N + OP31K + 27	EL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
32+33+28	UEL (PROFILO)	Na (sodio) + K (potassio) + CL (cloro) (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
OPACET	ACET	nAChR - Anti recettore acetilcolina - Anti recettore nicotinico muscolare	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 14 gg.	BS
952	MENIN	NEISSERIA MENINGITIDIS (Meningococco) ricerca COLTURALE	Tampone con terreno trasporto	max 4 gg.	CR
G523	g523	Next Generation Sequencing NGS - <b>NB. Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR
172	NGAL	NGAL (Gelatinasi Neutrofila - Lipocalina)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	max 6 gg.	CR
G523	g523	NGS - Next Generation Sequencing - <b>NB. Contattare genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 90 gg.	CR
57	AMMON	NH4 - Ammoniemia - Ammonio	Pr. T. Lilla trasparente (acqua e ghiaccio o ghiaccio secco)	in giornata	OGLIO-PO
C26	ni	Nichel su siero - Nichelemia	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	max 20 gg.	BS
C26	ni	Nichelemia - Nichel su siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	max 20 gg.	BS
C27	niu	Nichel su Urina - Nicheluria	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
C48	CATU	Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina – Catecolamine urinarie (Campione urina 24h acidificate SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato) SEGNALARE DIURESIS	max 15 gg.	OGLIO-PO
510A	510A	NOROVIRUS ricerca antigene nelle feci	Contenitore STERILE per FECI	max 4 gg.	CR
M43	ENO	NSE - Enolasi	Pr. T. Rosso alta stretta	max 8 gg.	CR
65A	PRBNP	NT-proBNP	Pr. Rosa corta	max 20 gg.	CR
		Numero di Dibucaina - Dibucaina <b>DISABILITATO NON SI ESEGUE PIU'</b>			
<b>O</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
75G	75G	OGTT – Curva glicemica - screening in GRAVIDANDASI ESEGUE SOLO DALLA 24° ALLA 28° SETTIMANA DI GRAVIDANZA - 3 PRELIEVI: BASALE DOPO 60' E 120'	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
74	CARGL	OGTT breve - Curva Glicemicabreve ( <b>Prevede due prelievi - BASALE e dopo 120 min.</b> )	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
83	CURGL	OGTT completa dopo carico ( <b>Prevede 5 prelievi a tempi da specificare al caricamento</b> )	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
359	OMO	Omocisteina basale (non si esegue con carico)	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 5 gg.	CR
G57	G57	Omocisteina Mutazioni Genetiche - MTHFR C 677 T - MTHFR	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 18 gg.	CR
M02	ACTH	Ormone Adrenocortico - ACTH	Pr. T. Viola (K3 EDTA) con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 5 gg.	CR
M06	AMH	Ormone Antimulleriano - AMH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
M16	FSH	Ormone Follicolo Stimolante - FSH sierico	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M27	LH	Ormone Luteinizzante - LH (sierico)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M21	HGH	Ormone Somatotropo - HGH - GH	Pr. T. Rosso alta stretta (acqua e ghiaccio)	max 5 gg.	CR



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
OSM	osm	Osmolarità plasmatica (calcolo di Rasouli su sodio, glicemia, urea)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
		Osmolarità urinaria. Non abbiamo codice per il calcolo. Eventualmente caricare glicosuria + creatinina urinaria + urea urinaria + sodio urinario su urine estemporanee			
C9	ossal	Ossaluria - Acido ossalico (Campione urina 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	max 7 gg.	OGLIO-PO
504	SCOTC	Ossiuri - Scotch test (FECl)	Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	in giornata	OGLIO-PO
M36	OST	Osteocalcina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
C50	OXCA	Oxcarbapazina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
<b>P</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
A38M	PANCA	p - ANCA - MPO (anticorpi anti mieloperossidasi) <b>NB: CARICARE SOLO SE RICHESTO IN MODO MIRATO, ALTRIMENTI CARICARE IL CODICE "ANCA" TEST DI SCREENING; SE RISULTERÀ POSITIVO VERRANNO AGGIUNTI DAL LABORATORIO ANCHE P-ANCA E C-ANCA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16gg	CR
25	P	P - Fosforo	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
P1NP	P1NP	P1NP (Peptide N-terminale del Procollagene di tipo I) - DISABILITATO	Pr. T. Rosso alta stretta	max 7 gg	CR
G102+G103	PAP-A (PROFILO) o G104 (PROFILO)	PAPP-A - Ultra Screen <b>(dalla 12° alla 13° settimana)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
309 + 310	MAL (PROFILO)	Parassita della Malaria - Plasmodio della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
502	FP	Parassiti intestinali ricerca nelle feci	Contenitore FECl	max 4 gg.	CR
M58P	PTHLI	Paratormone - PTH (di terza generazione)	Pr. Madreperla EDTA	max 5 gg.	CR
M58	CAP	Paratormone 1,84 CAP - PTH 1-84 (CAP) - Ciclasì Attivante il PTH (caricare questo codice quando è richiesto solo Paratormone senza specificare se CIP o CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M57	CIP	Paratormone 7,84 CIP - PTH 7-84 (CIP) - Ciclasì Inattivante il PTH (da caricare solo se specificatamente richiesto, per richieste generiche di Paratormone caricare CAP) - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
M31	PTH	Paratormone intatto PTH 1-84 - NON SI ESEGUE - DISABILITATO	Pr. T. Rosa bassa con acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	max 8 gg.	OGLIO-PO
234	PARO	Parotite - anticorpi IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
222G	222G	Parvovirus Anticorpi <b>IgG</b> -Parvovirus B19 Anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
222M	222M	Parvovirus Anticorpi <b>IgM</b> -Parvovirus B19 <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
C28	pb	Pb - Piombemia - Piombo Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg.	BS
C29	pbu	Pb - Piombemia - Piombo Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
202	PCR	PCR - Proteina C Reattiva	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR Epatite C QUALITATIVA - HCV RNA - <b>N.B. Caricare QUANTITATIVO codice T06</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR Epatite <b>CQUANTITATIVA e/o QUALITATIVA</b> - HCV RNA - <b>N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR Epatite C</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T05A+T011	T05 (PROFILO)	PCR HCV QUALITATIVO- HCV RNA QualitativoN.B. Caricare QUANTITATIVO cod.T06	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
T06A+T011	T06 (PROFILO)	PCR HCV <b>QUANTITATIVA e/o QUALITATIVA</b> - HCV RNA - <b>N.B. caricare questo codice per richieste generiche di PCR HCV</b>	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR
PERA	PERA	Perampanel	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
208	208	PERTOSSE Bordetella pertussis Anticorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 7 gg.	CR
65	BNP	Peptide natriuretico tipo B	Pr. T. Rosa bassa	in giornata	OGLIO-PO
207	LEPTO	Petit Martin - Leptospira <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	CR
625	emoar	pH Arterioso - Gasanalisi Arteriosa (conservare in ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
626	emoca	pH capillare - Gasanalisi Capillare (si esegue solo al Presidio Oglio-Po)	CAPILLARE	in giornata	OGLIO-PO
624	emove	pH venoso - Emogasanalisi Venosa (conservare in Ghiaccio)	Siringa apposita per Emogas. in acqua e ghiaccio o ghiaccio secco	in giornata	OGLIO-PO
304	PIAS	Piastrine – Codice da utilizzare <b>solo nei casi di incompatibilità all'EDTA</b> (diversamente caricare <b>Emocromo senza formula cod. 300U</b> )	Pr. speciale con CPT	in giornata	OGLIO-PO
365	365	PFA100 Test Funzionalità piastrinica - <b>IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.</b>	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	in giornata	CR
C28	pb	Piombo su Sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg.	BS
C29	pbu	Piomburia su Urina	Contenitore Urine (almeno 10 cc)	max 20 gg.	BS
309 + 310	MAL (PROFILO)	Plasmodio della Malaria - Malaria - Parassita della Malaria	Pr. T. Viola (+ bollino)	in giornata	OGLIO-PO
266	PNEU	Pneumococco nelle urine - Antigene Pneumococco ricerca nelle urine	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	CR
920N	PC	Pneumocystis Carinii	Contenitore Feci	4 gg.	CR
OP31K	OP31K	Potassiemia - Potassio - K	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
33	KUR	Potassio urine - K Urinario (Campione urina 24h <b>SEGNALARE DIURESIS</b> )	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
33F	33F	Potassio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
505	FCHI	Potere triptico - Chimotripsina - Chimico Fisico (Feci)	Contenitore FECI	max 2 gg.	OGLIO-PO
OP370	Dabl	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370B	DABIB	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) <b>BASALE</b> (prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP370C	DABI2	PRADAXA (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO PER DABIGATRAN) <b>Dopo</b> 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
gG296 + G90	g296 + G90	Prader Willi esame genetico - MLPA PWA ( <b>NB. Contattare GENETICA CR</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 30 gg.	CR
245	PAB	Prealbumina – Transtiretina	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
225	FUNG	Precipitine - Miceti - Saccaromiceti Ricerca Anticorpi su siero NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
PREGA	PREGA	Pregabalin	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
164	PRIMI	Primidone	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 GG.	OGLIO-PO
133	IGET	PRIST - IgE - IgE totali	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 3 gg.	OGLIO-PO
366	proca	Procalcitonina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 1 gg.	OGLIO-PO
M29	PG	Progesterone	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M30	PRH	Prolattina - PRH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
CURP	curp	Prolattina Curva - 3 prelievi in tempi e provette diverse (basale, 30' e 60')	Pr. T. Rosso alta stretta (3 prel.)	max 8 gg.	CR
326	PRCA	Proteina C antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	max 28 gg.	CR
PV19	PV19	Proteina cationica eosinofila	Pr. T. Rosso per Pavia	max 21 gg.	PV
321	PCC	Proteina C coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
325	PCA	Proteina C Global / APC Res - Resistenza Prot. C attivata	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
202	PCR	Proteina C Reattiva - PCR	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
15	BENCE	Proteina di Bence Jones su urine estemporanee o delle 24 ore - DISABILITATO	Contenitore urine (camp. estemporaneo o 24 h)	max 2 gg.	OGLIO-PO
333	PSL	Proteina S LIBERA antigenica	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
334	PRST	Proteina S totale ANTIGENICA	Pr. T. Azzurro bassa	max 28 gg.	CR
322	PCS	Proteina S coagulativa	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
10	TPROT	Proteine - Proteinemia totale - Proteine Totali	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OPLPPRO	lppro	Proteine su Liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
10P	ptpl	Proteine totali su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
10S	ptsi	Proteine totali su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO)	Proteinemia totale con Elettroforesi - caricare profilo EFTP	Pr. T. Ruggine alta e stretta + Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 2 gg	OGLIO-PO
406	PTUR	Proteinuria su campione URINA delle 24h, SEGNALARE LA DIURESIS	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE LA DIURESIS	in giornata	OGLIO-PO
406F	PTUR	Proteinuria su campione urina estemporaneo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
605	LIQUO	Protidorrhachia (caricare LIQUO: chimico fisico Liquor)	Provetta STERILE	in giornata	OGLIO-PO
C30	DISABILITATO	Protossido di azoto NON SI ESEGUE			
340	F II	Protrombina - Fattore II coagulativo	Pr. T. Azzurro bassa	max 17 gg.	CR
OP328	COA	Prove emogeniche (no prelievo, prova in vivo)	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO
986	PSV	PROVE STERILITA' SU MATERIALI VARI - es. colturale		max 6 gg.	CR
M32	PSA	PSA - PSA TOTALE - Antigene Prostatico Specifico	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M32	PSA	PSA LIBERO - PSA FREE - FREE PSA - Caricare solo PSA PSA libero verrà eseguito automaticamente se il risultato del PSA Totale fosse significativo	N.B. il Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
59	PCHE	Pseudocolinesterasi - CHE - Colinesterasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
M58P	PTHLI	PTH (di terza generazione) - Paratormone	Pr. Madreperla EDTA	max 5 gg.	CR
OP329	Ptt	PTT - Tempo di tromboplastina parziale - APTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
939	939	PUS esame COLTURALE per ricerca batteri e miceti	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR
		PyriLinks-D - Idrossiprolinuria (Urina campione) DISABILITATO – SOSTITUITO DA PRELIEVO PER CTX cod M22			
<b>Q-R</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	QPE - Quadro elettroforetico proteico	Pr. T. Ruggine alta e stretta +Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 1 gg	OGLIO-PO
11 + 10B	EFTP (PROFILO) o 11P (PROFILO)	Quadro elettroforetico proteico - QPE	Pr. T. Ruggine alta e stretta +Pr. T. Giallo-Rosso bassa	max 1 gg	OGLIO-PO
960Q	960Q	Quantiferon - <b>NB. si esegue tutti i giorni tranne il venerdì e prefestivi. Seguire procedura dedicata (chiedere al laboratorio)</b>	4 Provette apposite da richiedere AL LABORATORIO	Max 20 gg	CR
OP331	QUI	Quick - Tempo di protrombina - Tempo di Quick - INR	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	RA TEST - Fattore Reumatoide - RF - Reuma test	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
C17	cu	Rame - Cupremia - CU (siero)	Pr. T. Ruggine alta stretta	max 8 gg.	CR
C18	cuu	Rame urinario - Cupruria - CU Urina	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	max 20 gg.	BS
799	799	RAST - IgE Specifiche (l'elenco completo degli allergeni è in appendice 1. Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
209A	209A	Reazione Wasserman - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
M33	RENIN	Renina Clinostatismo (prelevare dopo circa 2 ore in posizione stesa) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg.	BS
M33 + M33STIM	REN (PROFILO)	Renina Clinostatismo + Ortostatismo ( <b>se non specificato clino+orto caricare, preferibilmente, per gli esterni RENO = renina in ortostatismo - per gli interni RENC = renina in clinostatismo</b> ) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg.	BS
M33STIM	RENO	Renina Ortostatismo (prelevare dopo almeno 2 ore in posizione eretta) - CONGELARE IL CAMPIONE IL PRIMA POSSIBILE IN LABORATORIO	Pr. Madreperla EDTA	max 15 gg.	BS
325	PCA	Resistenza Prot. C attivata - Proteina C Global / APC Res	Pr. T. Azzurro bassa	max 15 gg.	CR
OP303	RE	Reticolociti conteggio	Pr. T. Viola (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	Reuma test - RF - Fattore Reumatoide - RA TEST	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
201	RF	RF - Fattore Reumatoide - RA TEST - RF - Reuma test	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OPLPRF	lprf	RF su liquidi - Fattore Reumatoide su liquidi cavitari	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
T79	RIBA	RIBA Markers C - Test di conferma HCV <b>Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.</b>	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 23 gg.	CR
227TR_G	CLATR (PROFILO) o 251 (PROFILO)	Ricerca Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis <b>IgG</b> su siero (Anti IgA e IgM non si eseguono piu')	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis su Tampone CONGIUNTIVALE	Set per CHLAMYDIA	2gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione	
228	CLAM	Ricerca diretta Chlamydia Trachomatis (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto) - nella finestra scegliere il materiale	Set Chlamydia	2gg.	CR	
TRIUR	TRIUR	Ricerca diretta Trichomonas vaginalis su urina	Contenit. URINA (Camp. estemp. con mitto iniziale)	in giornata	OGLIO-PO	
OPMICR	micr	Ricerca Microscopica (generica)	Contenitore idoneo	1 g.	OGLIO-PO	
501	SOCC	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>(codice per campione singolo)</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR	
501A	SOCC1	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR	
501B	SOCC2	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR	
501C	SOCC3	Ricerca sangue occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR	
912R	912R	Ricerca diretta Streptococcus pyogenes - T. faringeo diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	max1 g.	CR	
799	799	Ricombinanti e Allergeni vari (l'elenco completo degli allergeni è in <b>appendice 1</b> . Se non precisamente richiesti gli allergeni vengono caricati al momento dell'esecuzione)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO	
OP380B	RIVAB	Rivaroxaban basale (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO	
OP380C	RIVA2	Rivaroxaban dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO	
OP380	Riva	Rivaroxaban dosaggio	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO	
218G	<b>218 (PROFILO)</b> Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rosolia Test <b>IgG</b> <b>NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)</b>	Per	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
218M	<b>218 (PROFILO)</b> Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rosolia <b>IgM</b> - Rubeo Test <b>IgM</b> <b>NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)</b>	Per	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
240	ROTA	Rotavirus + Adenovirus (ricerca nelle feci)	Contenitore FECl	1gg.	CR	
218G	<b>218 (PROFILO)</b> Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rubeo Test <b>IgG</b> <b>NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)</b>	Per	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
218M	<b>218 (PROFILO)</b> Utilizzare questo profilo per gravide altrimenti il cod.218G1	Rubeo Test <b>IgM</b> <b>NB. Utilizzare il codice profilo 218 (IgG+ IgM) per pazienti in gravidanza. Per controllo dello stato immunitario utilizzare il codice 218G1 (Disposizione Regionale)</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
RUFI	RUFI	Rufinamide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
209A	209A	RW (reazione Wasserman) - VDRL - Sifilide (si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
<b>S</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
225	FUNG	Saccaromiceti - Precipitine - Miceti - Ricerca Anticorpi NON SI ESEGUONO PIU'	Pr. T. Trasparente alta stretta		BS
M01	ACB	Sali Biliari - Acidi Biliari - Acidi Biliari Coniugati - ACB	Pr. T. Ruggine corta	max 8 gg.	CR
63	DISABILITATO	Salicilemia NON SI ESEGUE	Pr. T. Rosso Grossa		
906	COPRO	Salmonella ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore per FECI	max 4 gg.	CR
203	WW	Salmonelle Sierodiagnosi (caricare Widal-Wright) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
501	SOCC	Sangue Occulto ricerca nelle feci ( <b>codice per campione singolo</b> )	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR
501A	SOCC1	Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 1° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR
501B	SOCC2	Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 2° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR
501C	SOCC3	Sangue Occulto ricerca nelle feci <b>CAMPIONE 3° (codice per campioni multipli). Di norma si accettano solamente tutti i campioni consegnati contemporaneamente</b>	Contenitore apposito per S.O.	max 4 gg.	CR
511M	511M	Schistosoma haematobium - esame microscopico	Contenit. URINA (camp. estemporaneo del mitto finale della minzione, almeno 10 mL, raccolto tra le ore 10 e le 14, conservato al buio avvolto da carta stagnola e consegnato al laboratorio il prima possibile)	max 4 gg.	CR
504	SCOTC	Scotch test - Ossiuri	Contenitori con conservante (Para-Pak Eco Fix) e tamponi secchi da richiedere al Laboratorio con le modalità di prelievo	in giornata	CR
911	SEPRO	Secreto prostatico esame colturale per batteri e miceti	Contenitore sterile	max 4 gg.	CR
C31	se	Selenio su sangue	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 20 gg.	BS
T07A + T011	T07 (PROFILO)	SEQUENZIAMENTO HCV - GENOTIPO HCV - TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV)	Pr. T. Rosa alta (CT CR)	max 12 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
60	5H	Serotonina - Acido 5-idrossindolacetico - 5 OH Indolacetico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 18 gg.	OGLIO-PO
906	COPRO	Shigella, ricerca colturale nelle feci (caricare 906 Coprocoltura)	Contenitore STERILE per FECI	max 4 gg.	CR
66	SID	Sideremia - Ferro - Fe	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
203	WW	Sierodiagnosi Brucelle (caricare Widal Wright) su siero	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
205	GHE	Sierodiagnosi di Ghedini-Weinberg - Anti Echinococco	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
203	WW	Sierodiagnosi di Widal-Wright (siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
203	WW	Sierodiagnosi Salmonella - Widal-Wright (su siero)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
COVABQ	COVQ	Sierologico COVID (quantitativo IgG anti S1 e S2) - CORONAVIRUS	Pr. T. Ruggine Bassa	max 4 gg.	CR
COVAB	COVAB	Sierologico COVID (screening qualitativo IgG/IgM/IgA anti N) - CORONAVIRUS	Pr. T. Ruggine Bassa	max 4 gg.	CR
OPSAA	OPSAA	Siero Amiloide - SAA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 14 gg.	PV
209A	209A	Sifilide - LUE - RW (Wasserman) - VDRL. <b>Si esegue uno screening per sifilide</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
257	FTA	Sifilide <b>IgM</b> - Lue anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
255	RPR	Sifilide <b>R.P.R.</b> - Lue anticorpi <b>R.P.R.</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
256	TPPA	Sifilide <b>TPPA</b> - Lue anticorpi <b>TPPA</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
171	SIRO	Sirolimus	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	max 9 gg.	CR
31N	NA	Sodiemia - Sodio - Na	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
31N	NA	Sodio - Na - Sodiemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
32	NAUR	Sodio urine 24h (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h), SEGNALARE DIURESIS	in giornata	OGLIO-PO
32F	32F	Sodio urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
M15	m15	Somatomedina C - Insulin Like Grow TH Factor1 - IG F1 - Fattore di crescita insulino simile 1	Pr. T. Rosso alta stretta (spedire in acqua e ghiaccio)	max 15 gg.	CR
953N	GEN	Sonde Genetiche Dirette per BK (al caricamento specificare il materiale)	Contenitore STERILE	max 10 gg,	CR
C51	C51	Sottoclassi IGG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 16 gg.	BS
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Sottopopolazione linfocitaria - Tipizzazione linfocitaria semplice	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	5 gg.	CR
914	914	Spermicoltura (la raccolta si esegue a domicilio in contenitore sterile da urina)	Contenitore STERILE	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
612	SPEM	Spermiogramma (previo appuntamento 0375 281575, la raccolta si esegue in ospedale)	Contenitore adeguato	in giornata	OGLIO-PO
938	DERMA	Spore Fungine - Miceti - Dermatofiti - Funghi - Candida ricerca COLTURALE su materiale vario	Contenitore STERILE	max 8 gg.	CR
STIRI	STIRI	Stiripentolo	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
924N	PM	Streptococco METICILLINO RESISTENTE (MRSA). Esame colturale	Tampone con terreno trasp.	max 2 gg.	CR
926	926	Streptococcus agalactiae (gr. B) - es. colturale (Al caricamento scegliere il materiale)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
912R	912R	Streptococcus pyogenes - Tampone faringeo per ricerca diretta (rapido)	Tampone con terreno trasp.	max1 g.	CR
508C	508C	Strongyloides stercoralis - esame colturale	Contenitore feci (mezzo pieno)	max 8 gg.	CR
SULTI	SULTI	Sultiame	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
<b>T</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
		T3 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
		T4 NON SI ESEGUE (caricare codice TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta		
170	TACRO	Tacrolimus - FK 506	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	max 5 gg.	OGLIO-PO
COV19	COV19	Tampone molecolare CORONAVIRUS - COVID - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	max 2 gg.	CR
COVAG	COVAG	Tampone rapido antigenico CORONAVIRUS - SARS Cov 2	Tampone per Coronavirus	max 2 gg.	CR
908	TAU	Tampone Auricolare (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
918C	TENDO	Tampone cervicale es. colturale	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
228 +932	CLAM +932	Tampone Cervicale (Ricerca Gonococco-Chlamydia-Mycoplasma Ureaplasma). Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE"	Set Chlamydia + tampone secco e brodino R1 di trasporto per micoplasmi	max 4 gg.	OGLIO-PO
228	CLAM	Tampone CERVICALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta	Set per CHLAMYDIA	2gg.	CR
921	TCONG	Tampone Congiuntivale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp. (piccolo) +1 Vetrino	max 4 gg.	CR
912	TFAR	Tampone Faringeo COLTURALE	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
912R	912R	Tampone faringeo per ricerca diretta S.pyogenes (rapido)	Tampone con terreno trasp.	max1 g.	CR
907	TAFE	Tampone ferita, ESAME COLTURALE per batteri e miceti	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
907	TAFE	Tampone FERITA per ANAEROBI verrà richiesto di specificare il materiale, caricare il codice scegliendo il relativo materiale "ESSUDATO DA FERITA (ANA)"	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
915	TNASO	Tampone nasale (verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
924N	PM	Tampone per Meticillino resistenza	Tampone con terreno trasp.	max 2 gg.	CR
957	957	Tampone per ricerca BACILLO DIFTERICO.(Specificare il materiale all'inserimento)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
929	TVARI	Tamponi Vari - Esame colturale (esempio cutaneo, decubito, ulcera, pene, inguinale, linguale, perianale ecc. Verrà richiesto all'inserimento di specificare se DESTRO o SINISTRO)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
929S	929S	Tampone per ricerca colonizzazione da GERMI SENTINELLA	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Tampone Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Set per CHLAMYDIA o Barattolo urine sterile	2gg.	CR
929	TVARI	Tampone orale, linguale	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
929C	TCARB	Tampone Rettale per Carbapenemasi	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
929E	TESBL	Tampone rettale per ESBL	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
929V	TRENT	Tampone rettale per enterococchi VRE	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
<b>228 + 932 + 931N + 942</b>	CLAM + 932 + TRICO + SEUR	<b>Tampone Uretrale per ricerca Gonococco - Chlamydia - Mycoplasma - Ureaplasma - Trichomonas.</b> Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Set per CHLAMYDIA o barattolo urine + tampone secco e brodino R1 di trasporto per micoplasm + tampone secco e brodo Trichosel	max 4 gg.	CR
<b>942</b>	942	<b>Tampone Uretrale per ricerca colturale germi comuni.</b> Al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE"	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
228	CLAM	Tampone URETRALE Chlamydia Trachomatis ricerca diretta (nella femmina eseguire tampone preferibilmente cervicale, nel maschio la ricerca si esegue su un campione di urina estemporaneo 1° mitto)	Set per CHLAMYDIA o Barattolo urine sterile	2gg.	CR
918V + 931N	TAVAG + TRICO	Tampone vaginale + Trichomonas vaginalis	Tampone con terreno trasp. + 2 vetrini per striscio vaginale da tampone secco + tampone secco e boccetto con brodo di trasporto trichosel (brodo marrone)	max 4 gg.	CR
926	926	Tampone Vagino-Rettale (Streptococcus agalactiae)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
918V		Tampone vulvare (scegliere in tendina materiali il t. vulvare)	Tampone con terreno trasp.	max 4 gg.	CR
OP331T + VISB	TAO (PROFILO)	TAO + Visita breve per Terapia Anticoagulante Orale (Visita + QUICK) PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
200	TAS	TAS - Titolo anti streptolisinico - ASLO	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
OP331	QUI	TdP - Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
293	TEICO	Teicoplanina - dosaggio antibiotico glicopeptide	Pr. apposita con granuli per Brescia da richiedere al LABORATORIO	max 15 gg.	BS
G47+ G48+ G274	G47+ G48+ G274	Telomeri multipli Indagine GENETICA ( <b>Contattare Genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 32 gg.	CR
M22	M22	Telopectide C-Terminale del collagene di tipo I (CTX) ( <i>SOSTITUISCE UID: PYRILINKS-D (IDROSSIPROLINURIA)</i> )	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
OP328	COA	Tempo di emorragia - Prove emogeniche - NON SI ESEGUE PIU', AL SUO POSTO SI ESEGUE ANALISI 365	Prova in vivo	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
365	365	Test Funzionalità piastrinica PFA100 - <b>IL PRELIEVO IN LAB. ANALISI POOP ALLE ORE 9.00 SOLO LUNEDI' E VENERDI'. INVIATO A CR ED ESEGUITO ENTRO DUE ORE.</b>	2 Pr. T. Azzurro bassa non centrifugate	in giornata	CR
OP331	QUI	Tempo di protrombina - Quick - Tempo di Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331	QUI	Tempo di Quick -Tempo di protrombina - Quick - INR - Attività protrombinica	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP331T	TERAP	Tempo di Quick In terapia anticoagulante - INR in terapia anticoagulante <b>N.B. UTILIZZARE QUESTO CODICE SOLO PER PRELIEVI MULTIPLI</b>	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
337	TT	Tempo di trombina	Pr. T. Azzurro bassa	max 3 gg.	OGLIO-PO
OP329	Ptt	Tempo di tromboplastina parziale - APTT - PTT	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP329M	PTTM	Tempo di tromboplastina parziale CON MISCELAZIONE	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
168	TEO	Teofillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
T79	RIBA	Test di conferma HCV - RIBA Markers C (N.B Non caricare viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 23 gg.	CR
T74	WB	TEST DI CONFERMA HIV 1-2 (N.B. Non caricare. Viene eventualmente inserito dal Lab.)	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta		CR
T54N	COD	Test di Coombs DIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	max 1 g.	POOP-CT
T55	COI	Test di Coombs INDIRETTO	Pr. T. Viola (+ bollino)	max 1 g.	POOP-CT
215	GRAV	Test di Gravidanza - Gravindex	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
M40	TH	Testosterone totale - TH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M40F	m40f	Testosterone libero	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
224	224	Tetano - Anti Tossina Tetanica IgG	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	CR
M18	FT4	Tetraiodotironina Libera - FT4 (N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M23	HTg	Tg - HTg - Tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
TIAGA	TIAGA	Tiagabina	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
CGTIP	CGTIP	Tipizzazione Crioglobuline	Pr. T. Rosso grossa + Pr. T. Giallo chiara. <b>Prelievo a caldo</b>	9 gg.	OGLIO-PO
T07A + T011	T07 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA EPATITE C (HCV) - GENOMA HCV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	max 12 gg.	CR
T09A + T00 + T0B + T0A + T011	T09 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HIV - HIV SEQUENZIAMENTO - GENOMA HIV - GENOTIPO HIV	Pr. T. Rosa alta (EMAT CR)	max 16 gg.	CR
T37A + T37B + T01	TIPHQ (PROFILO) (T37A + T37B + T01)	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQ2 DQ8 per MALATTIA CELIACA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - <b>da prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37B + T01	T37 B + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T31A + T01	HLA-A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T32A + T01	HLA-B + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T33A + T01	T33A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
T34A + T01	T34A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T35A + T01	T35A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T38A + T01	T38A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB ALTA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37A + T01	T37A + T01	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB BASSA RISOLUZIONE	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T38A + T01	TIPIZZAZIONE HLA DI II° CLASSE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T31A + T32A + T33A + T01	HLA1 (PROFILO)	TIPIZZAZIONE HLA DI I° CLASSE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T32A + T33A + T01	T32A + T33A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE PSORIASICA - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER ARTRITE REUMATOIDE- LES - MORBO DI CROHN - TIROIDITE DI HASHIMOTO - MALATTIA DI GRAVES - CONNETTIVITE - PEMFIGO - SINDROME DI SJOGREN - MALATTIA DI GOODPASTURE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37A + T37B + T34A + T35A + T01	T37A + T37B + T34A + T35A + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER DIABETE - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T37A + T37B + T01	T37A + T37B + T01	TIPIZZAZIONE HLA PER NARCOLESSIA (se positiva l'esame prosegue con T34A e T35A) - <b>Prenotare al CT CR n° 0372 405159</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 7 gg.	CR
T831 + T832 + T833	T83 (PROFILO)	Tipizzazione Linfocitaria CD 45	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	max 4 gg.	CR
T811 + T865 + T816 + T812 + T830 + T837 + T846 + T847 + T819 + T820+ T839 + T821A + T844	T81 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria ematologica (previo appuntamento con laboratorio). <b>Si esegue ogni giorno previa prenotazione al 5613 e serve il modulo.</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	7 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
T680 + T682 + T683 + T688 + T684 + T685 + T689	T68 (PROFILO)	Tipizzazione linfocitaria semplice. <b>Si esegue solo il lunedì e giovedì.</b>	Pr. T. Rosa bassa (EMAT CR)	5 gg.	CR
M24	ABHTG	Tireoglobulina Anticorpi - Anti tireoglobulina	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M23	HTg	Tireoglobulina - HTg - Tg	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	Tireotropina - TSH (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti AU - Titolo Anti HBs - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
T213	HBsAb	Titolo Anti HBs - Titolo Anti AU - HBsAb Titolo Anticorpale	Pr. T. Blu Elettrico alta e stretta	max 4 gg.	CR
200	TAS	Titolo Anti streptolisinico - ASLO - TAS	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
C49	TOPI	Topiramato	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
916N	CLO	Tossina CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca nelle feci <b>NB. si esegue solo su feci diarroiche, fresche e conservate in ghiaccio.</b>	Contenitore per feci conservate <u>in ghiaccio</u>	1 g.	CR
TOXCA	TOXCA	Toxocara canis antivorpi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 20 gg.	PV
264	TOXAV	Toxoplasma <b>Avidity IgG</b> N.B. Caricare il profilo TOX (se necessario il test per Avidity verrà aggiunto dal laboratorio) - Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
206G	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma <b>IgG</b> NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
206G + 206M	TOX (PROFILO) o 206 (PROFILO)	Toxo <b>IgG e IgM</b> N.B. CARICARE SEMPRE ENTRAMBI I CODICI 206G + 206M (O I PROFILO "TOX") NON RICHIEDERE L'EVENTUALE TEST PER TOXO AVIDITY CHE VERRA' AGGIUNTO AUTOMATICAMENTE DAL LABORATORIO SE NECESSARIO Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
206M	206 (caricherà TOXO G+M disposizione Regionale)	Toxoplasma <b>IgM</b> NB. Utilizzare il codice 206 (profilo IgG+IgM) Disposizione Regionale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
M91	TPA	TPA - Antigene Polipeptidico Tissutale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	BS
209A	209A	TPPA	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
	TPA	TPS (caricare TPA)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 15 gg.	BS
M56	AbTSH	TRAB - Ab TSH - Anti recettori TSH - Anti TSH	Pr. T. Rosso alta stretta	max 9 gg.	CR
951T	ASTRA	Tracheostomia aspirato	Contenitore sterile BA	max 4 gg.	CR

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
44 + 45	GOT + GPT	Transaminasi (caricare GOT e GPT)	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
44	GOT	Transaminasi GOT - GOT - AST - Glutammico Ossalacetico Transaminasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
45	GPT	Transaminasi GPT - GPT - ALT - Glutammico Piruvico Transaminasi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
67	TRAN	Transferrina	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
67	trfsi	Transferrina su liquido sinoviale	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
68	TIBC	Transferrina Capacità ferro-legante	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
C43	TRDE	Transferrina desialata - Transferrina carboidrato carente - CDT	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 10 gg.	OGLIO-PO
297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
297G	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	Transglutaminasi IgG - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
G307	g307	Translocazione t(11;14)(q13;q32) - FISH per t(11;14)(q13;q32)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 21 gg.	CR
245	PAB	Transtiretina - Prealbumina	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
TRIUR	TRIUR	Trichomonas ricerca DIRETTA su urina	Contenit. URINA (Camp. estemp. con mitto iniziale)	in giornata	OGLIO-PO
931N	TRICO	Trichomonas ricerca COLTURALE su materiali vari (materiale da specificare al caricamento)	Tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto trichosel (brodo marrone)	3 gg.	CR
931N	TRICO	TRICHOMONAS VAGINALIS - ricerca colturale	Tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto trichosel (brodo marrone)	max 4 gg.	CR
21	TRIGL	Trigliceridi	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
21L	tripl	Trigliceridi su liquido pleurico	Contenitore LIQUIDI (eparinato)	in giornata	OGLIO-PO
M17	FT3	Triiodotironina - FT3 <b>N.B. Se richiesto anche il TSH non caricare questo esame che verrà eseguito in automatico dal laboratorio se necessario</b>	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
C42	C42	Triptasi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
64A	TNI	Troponina I - Troponina	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	in giornata	OGLIO-PO
M39A per interni M39R per esterni	M39A (PER INTERNI), M39R (PER ESTERNI)	TSH - Tireotropina (NON E' NECESSARIO CARICARE EVENTUALI FT3 O FT4 IN QUANTO VENGONO ESEGUITI AUTOMATICAMENTE IN BASE AI RISULTATI DEL TSH)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
297 o 297D	297DI (PROFILO) o 297M (PROFILO)	TTG <b>IgA</b> - Anti Transglutaminasi IgA - CARICARE IL PROFILO 297DI per diagnosi (senza esenzione RI0060) o297M (per monitoraggio con esenzione RI0060)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 13 gg.	CR
<b>U</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
G102 + G103	PAP-A (PROFILO) O G104 (PROFILO)	Ultra Screen - PAPP-A (si esegue dalla 12° alla 13° settimana di gravidanza)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
39	ACUR	Urato - Acido urico - Uricemia	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
5	AZOTU	Urea urinaria (URINA 24h SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h)	in giornata	OGLIO-PO
3F	UREA1	Urea urinaria spot (URINA ESTEMPORANEA)	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
932	932	Ureaplasma e Mycoplasma ricerca colturale su URETRA (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO URETRALE")	Tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto R1 (tappo bianco)	max 4 gg.	OGLIO-PO
932	932	Ureaplasma e Mycoplasma ricerca colturale su CERVICE (al caricamento scegliere il materiale "ESSUDATO ENDOCERVICALE")	Tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto R1 (tappo bianco)	max 4 gg.	OGLIO-PO
932	932	Ureaplasma e Mycoplasma, ricerca colturale su MATERIALI VARI (al caricamento scegliere il materiale. <b>NB.</b> non si esegue su vagina, se richiesto caricare TAMP. CERVICALE)	Tampone secco e bocchetto con brodo di trasporto R1 (tappo bianco)	max 4 gg.	OGLIO-PO
39	ACUR	Uricemia - Urato - Acido urico	Pr. T. Ruggine alta stretta	in giornata	OGLIO-PO
40	AU25	Uricuria - Acido urico urinario (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESIS	in giornata	OGLIO-PO
40F	40F	Uricuria su urine spot	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
42	CRUR	Urine creatinina su campione 24 ore (Campione urina 24h, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. 24h), SEGNALARE DIURESIS	in giornata	OGLIO-PO
42F	42F	Urine creatinina su campione estemporaneo (inserire 0, "zero", quando viene richiesta la diuresi)	Contenit. URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
400	URINE	Urine: esame completo	Provetta URINA (Camp. estemp.)	in giornata	OGLIO-PO
228	CLAM	Urina primo mitto per ricerca Chlamydia Tracomatis/Gonococco (Bio. Mol.)	Contenit. URINA (Camp. estemp. 1° mitto)		CR
903	URO	Urinocoltura	Contenitore STERILE urine	max 4 gg.	CR
61	UROP	Uroporfirine ( <b>Campione urina estemporanea</b> o camp 24h <b>oscurate</b> , SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (Camp. estemp o 24h oscurato), SEGNALARE DIURSIS	max 6 gg.	BS
<b>V - W</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
G540 + G90	G540 + G90	V617F MUTAZIONE - Jak 2 ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 21 gg.	CR
165	VALP	Valproato - Valproato di sodio - Acido Valproico	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg.	OGLIO-PO
290C	290C	Vancomicina INFUSIONE CONTINUA	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
290V	VANV	Vancomicina VALLE (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
290P	VANP	Vancomicina INFUSIONE INTERMITTENTE (PICCO) (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione del farmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
209P + 290V	VANCO (PROFILO)	VANCOMICINA Picco + Valle (tempi di prelievo condizionati dall'assunzione delfarmaco)	Pr. T. Verde bassa (Li eparina)	max 3 gg.	CR
G290 + G90	G290 + G90	variante allelica CYP2C19*2A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G287 + G90	G287 + G90	Variante allelica CYP2D6*3A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G288 + G90	G288 + G90	Variante allelica CYP2D6*4A ( <b>Contattare Genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G289 + G90	G289 + G90	Variante allelica CYP2D6*6A ( <b>Contattare genetica CR per conferma</b> )	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
G287 + G288 + G289 + G90	G287+G288+G289+G90	Varianti Alleliche CYP2D6 3A + CYP2D6 4A + CYP2D6 6A <b>Contattare Genetica CR per conferma</b>	Pr. T. Giallo chiaro (K2 EDTA)	max 20 gg.	CR
T56C	HBAN	Varianti emoglobiniche - Emoglobine anomale - Elettroforesi Hb	Pr. T. Rosa alta (K2 EDTA)	max 8 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
232G	VARIG	Varicella Zoster anticorpi <b>IgG</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
232M	VARIM	Varicella Zoster anticorpi <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
232G + 232M	HERPZ (PROFILO) o 232P (PROFILO)	Varicella Zoster anticorpi <b>IgG+ IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
M28	M28	Vasopressina - Copeprina (si esegue al posti di ADH)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 15 gg.	CR
209A	209A	VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE(Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
216	LUEM	VDRL <b>IgM</b> - Lue anticorpi <b>IgM</b> - Sifilide <b>IgM</b>	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 9 gg.	CR
315	VES	Velocità di eritrosedimentazione - VES	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
315	VES	VES - Velocità di eritrosedimentazione	Pr. T. Lilla trasparente (K3 EDTA)	in giornata	OGLIO-PO
917	VIBR	VIBRIO SPP esame colturale	Contenitore per feci	max 4 gg.	CR
VIGAB	VIGAB	Vigabatrin	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO
G261+ G262+ G263+ G264	VILLO (PROFILO)	Villocentesi	Contenitori idonei	max 23 gg.	CR
945	H1N1	Virus influenza H1N1	Tampone per virus	Max 2 gg	CR
239	RSV	Virus Sinciziale Respiratorio (ricerca diretta) - RSV	Contenitore STERILE per aspirato naso-faringeo <u>in ghiaccio</u>	max 2	CR
OP331T + VISB	TAO (PROFILO)	Visita breve per TAO + Terapia Anticoagulante Orale (Visita + QUICK) <b>PER IMPEGNATIVE MULTIPLE CARICARE TANTI CODICI QUANTE SONO LE RICHIESTE DI ESAME</b>	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
C70	VITA	VITAMINA A (Retinolo)	Pr. T. Viola OSCURATA	max 56	MI
C67	VITB1	VITAMINA B1 (Tiamina)	Pr. T. Viola OSCURATA	max 56	MI
C68	VITB2	VITAMINA B2 (Riboflavina)	Pr. T. Viola OSCURATA	max 56	MI
C68	VITB6	VITAMINA B6 (Piridossina)	Pr. T. Viola OSCURATA	max 56	MI
M48	VB14	VITAMINA B12 (Cobalamina)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 4 gg.	CR
C71	VITC	VITAMINA C (Acido Ascorbico)	Pr. T. Rosso Grossa OSCURATA	max 56	MI
M49	VID	VIT.D3 / 1-25 VITAMINA D / 1-25(OH)2 VIT.D3 / CALCITRIOLO / Calciferolo / Diidrossi Vitamina D (se viene richiesto genericamente vitamina D, caricare VID25)	Pr. T. Rosso alta stretta	max 9 gg.	CR
M59	VID25	VITAMINA D - 25 OH Vitamina D	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 8 gg.	OGLIO-PO
C72	VITE	VITAMINA E (Tocoferolo)	Pr. T. Viola OSCURATA	max 56	MI

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
58	VMA	VMA - Acido vanilmandelico (Campione urina 24h acidificate, SEGNALARE DIURESIS)	Contenitore URINA (CAMP.24h acidificato), SEGNALARE DIURESIS	max 8 gg.	OGLIO-PO
C76	VORI	Voriconazolo (dosaggio)	Pr. Siero con granuli	max 25 gg.	BS
OP237	WR	Waalser Rose - WR	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	OGLIO-PO
209A	209A	Wasserman - VDRL - Sifilide - RW (reazione Wasserman) - LUE screening (Si esegue uno screening per sifilide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 6 gg.	CR
235	RiCK	Weil Felix - Rickettsiosi (sierodiagnosi)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 5 gg.	CR
PV01	pv01	West Nile virus	Pr. T. Rosso Grossa + 1 contenitore urine. PER MODALITA' SPECIFICHE CHIEDERE AL LAB	Max 15 gg	PV
203	WW	Widal Wright	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	CR
OP237	WR	WR - Waaler Rose	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 2 gg	OGLIO-PO
<b>X-Y-Z</b> <a href="#">Torna a Pag. 1.</a>					
OP380	Riva	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP380B	RIVAB	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) BASALE (Prima della somministrazione)	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
OP380C	RIVA2	XARELTO (NOME COMMERCIALE DEL FARMACO RIVAROXABAN) Dopo 2 ore dalla somministrazione	Pr. T. Azzurro bassa	in giornata	OGLIO-PO
G60	G60(PROFILO)	XFRA-Cromosoma X Fragile (PROFILO)	Pr. T. Verde grossa (Li eparina)	max 23 gg.	CR
923	YERS	Yersinia Ricerca colturale nelle feci	Contenitore per feci	max 4 gg.	CR
C32	zn	Zinco - Zinchemia siero	Pr. T. Rosso piccola (per BS)	max 20 gg.	BS
C34	znu	Zinco su urina Zincuria	Contenitore Urine (almeno 10 ml)	max 20 gg.	BS
C33	zinp	Zincoprotoporfirina eritrocitaria. Partenza stesso giorno di esecuzione (mercoledì). Da prenotare alla segreteria di Cremona al n. 0372405452 dalle 10 alle 16.	Pr. T. verde scuro corta per PV	max 15 gg.	PV
ZONI	ZONI	Zonisamide	Pr. T. Verde scuro bassa (Li eparina)	max 15 gg.	OGLIO-PO



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
CODICE NUMERICO	SIGLA INTERNAZ.	APPENDICE 1 - ALLERGENI	Contenitore	Tempi di esecuzione	Sede esecuzione

N.B. CARICARE SEMPRE IL CODICE 799 IN AGGIUNTA A UNO O PIU' ALLERGENI RICHIESTI. QUALORA SULLA RICHIESTA NON FOSSE BEN SPECIFICATI GLI ALLERGENI, CARICARE SOLO IL CODICE 799, IL LABORATORIO VALUTERA' AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE QUALI ALLERGENI INSERIRE.

#### FARMACI

C01	C1	Penicillina G	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
C02	C2	Penicillina V	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
C203	C5	Ampicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
810	C7	Cefaclor	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
C204	C6	Amoxicillina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
811	C202	Succinicolina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
812	C260	Morfina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

#### ACARI E POLVERI

716	D1	Dermatophagoides pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
717	D2	Dermatophagoides farinae	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
H1	H1	Polveri di casa (Greer)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
H2	H2	Polveri di casa (Hollister)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti acari e polveri</b>					
D202	D202	rDer p 1 House dust mite - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
845	D203	rDer p 2 House dust mite - Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
D209	DER23	Der p 23, Dermatophagoides Pteronyssinus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
D205	D205	rDer p 10 Tropomyosin - Dermatof. pteronys.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

#### EPITELI E PROTEINE ANIMALI

714	E1	Forfora di gatto	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
758	E3	Forfora di cavallo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
718	E4	Forfora di vacca	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
E5	E5	Forfora di cane	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
815	E6	Epitelio di cavia	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
E82	E82	Epitelio di coniglio	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
752	E83	Epitelio di maiale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
760	E85	Piume di gallina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
813	E87	Proteine seriche e urinarie di ratto	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
814	E88	Proteine seriche e urinarie di topo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti proteine animali</b>					
846	E94	rFel d1 Cat - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
847	E220	nFel d 2 Cat serum albumin - Felis domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
848	E226	rCan f 5 Dog - Canis familiaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
849	E228	rFel d 4 Cat - Felis Domesticus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ALIMENTI</b>					
720	F1	Albume	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
722	F2	Latte	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
723	F3	Pesce (Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
726	F4	Grano	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
761	F5	Segale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
762	F6	Orzo (ALIMENTI)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
763	F7	Avena (ALIMENTI)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
764	F8	Granoturco (ALIMENTI) - Zea mays	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
724	F9	Riso integrale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F10	F10	Semi di sesamo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
740	F12	Piselli	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
725	F13	Arachidi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
737	F14	Semi di soia	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
727	F15	Fagioli bianchi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
744	F17	Nocciola	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
826	F18	Noce brasiliana	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F23	F23	Granchio comune	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
739	F24	Gambero	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
733	F25	Pomodoro	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
765	F26	Carne di maiale	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F27	F27	Carne di bue	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
728	F35	Patata	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F37	F37	Mitile	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F40	F40	Tonno	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
832	F41	Salmone	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
754	F44	Fragola	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
730	F45	Lievito	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
768	F49	Mela	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
831	F59	Polpo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
745	F75	Tuorlo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
742	F79	Glutine	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
772	F83	Carne di pollo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
773	F84	Kiwi	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
774	F85	Sedano	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
775	F87	Melone	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
818	F89	Senape	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
777	F92	Banana	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F93	F93	Cacao	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
741	F95	Pesca	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
821	F124	Farro	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
819	F206	Sgombro	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
823	F215	Lattuga	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
820	F216	Cavolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
824	F235	Lenticchia	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
830	F253	Pinolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F256	F256	Noce	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
816	F258	Calamaro	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F259	F259	Uva	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
817	F296	Carruba	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
822	F300	Latte di capra	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F80	F304	Aragosta	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
833	F308	Sardina europea	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
825	F324	Luppolo	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F402	F328	Fico	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti alimenti</b>					
769	F76	nBos d 4 alpha-lactalbumin, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
770	F77	nBos d 5 beta-lactoglobulin, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
771	F78	nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F98	F98	Gliadina(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
827	F232	nGal d 2 Ovalbumin, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
828	F233	nGal d 1 Ovomuroid, Egg - Gallus spp.	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
829	F323	nGal d 3 Conalbumin, Egg - Gallus spp.(ovotransferrina)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F352	F352	rAra h 8 PR-10 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
850	F353	rGly m 4 PR-10 Soy - Glycine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F354	F354	rBer e 1 Brazil nut - Bertholletia excelsa(Noce brasiliana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F355	F355	rCyp c 1 Carp - Cyprinus carpio(Carpa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F416	F416	rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat - Triticum spp.(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F417	F417	rApi g 1.01 PR-10, Celery - Apium grav.(Sedano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F419	F419	rPru p 1 PR-10, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F420	F420	rPru p 3 LTP, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
F421	F421	rPru p 4 Profilin, Peach - Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F454	PRU7	Pru p 7, Pesca, GRP: Prunus persica(Pesca)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F422	F422	rAra h 1 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F423	F423	rAra h 2 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F424	F424	rAra h 3 Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F447	ARA6	Ara h 6, Arachide: Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F427	F427	rAra h 9 LTP Peanut - Arachis hypogaea(Arachide)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F425	F425	rCor a 8 LTP Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
851	F426	rGad c 1 Cod - Gadus morhua(Merluzzo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
A443	ANA3	Ana o 3, Anacardo: Anacardium occidentale(Anacardo)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F428	F428	rCor a 1 PR-10 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F431	F431	nGly m 5 Beta-conglycinin,Soy - Glicine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F432	F432	nGly m 6 Glycinin,Soy - Glicine max(Semi di soia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F433	F433	rTri a 14 LTP, Wheat - Triticum aestivum(Grano)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
852	F434	rMal d 1 PR-10 Apple - Malus domestica(Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
853	F435	rMal d 3 LTP Apple - Malus domestica(Mela)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F439	F439	rCor a 14 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F440	F440	nCor a 9 Hazel nut - Corylus avellana(Nocciola)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F441	F441	rJug r 1 Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
F442	F442	rJug r 3 LTP Wainut - Juglans regia(Noce)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>GRAMINACEE</b>					
783	G2	Erba Canina(Cynodon dactylon)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
710	G6	Coda di topo - Codolina(Phleum pratense)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
786	G8	Gramigna dei prati(Poa pratensis)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
787	G13	Bambagiona(Holcus lanatus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti graminacee</b>			Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
G0205	G205	rPhl p 1 Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
G0212	G212	rPhl p 12 Profilin Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
G0215	G215	rPhl p 5b Timothy - Phleum pratense	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
G0216	G216	nCyn d 1 Bermuda grass - Cynodon dactylon	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>VELENI DI INSETTO</b>					
789	I1	Ape(Apis mellifera)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
790	I3	Giallone (Vespula)(Vespula spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
794	I75	Calabrone europeo(Vespa crabro)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
834	I77	Vespa europea(Polistes dominulus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
835	I205	Bombo(Bombus terrestris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
<b>ricombinanti veleni di insetto</b>					
I208	I208	rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
I209	I209	rVes v5 Common wasp - Vespa vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
I210	I210	rPol d 5 European Paper wasp-Polistes dominulus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
I211	I211	rVes v1 Phospholip. A1 - Vespa vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
854	I214	rApi m 2 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
855	I216	rApi m 5 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
856	I217	rApi m 10 Honey bee - Apis mellifera	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>PROFESSIONALI / ENZIMI</b>					
K80	K80	Formalina	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
759	K82	IgE spec. per lattice	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K212	K212	Polvere di legno	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti professionali/enzimi</b>					
796	K87	nAsp o 21 alpha-amylase - Aspergillus oryzae	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K215	K215	rHev b 1 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K217	K217	rHev b 3 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K218	K218	rHev b 5 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K219	K219	rHev b 6.01 Lattex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K220	K220	rHev b 6.02 Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
K221	K221	rHev b 8 Profilin Lattex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
861	K222	rHev b 9 Latex - Hevea brasiliensis (NON SI ESEGUE PIU')	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
862	K224	rHev b 11 Latex - Hevea brasiliensis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>MUFFE</b>					
798	M2	Cladosporium Herbarum	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
719	M6	Alternaria Alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
836	M228	Aspergillus flavus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti muffe</b>					
M229	M229	rAlt a 1 - Alternaria alternata	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
857	M218	rAsp f1 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
858	M220	rAsp f3 - Aspergillus fumigatus	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>CARBOIDRATI</b>					
<b>ricombinanti carboidrati</b>					
O214	O214	MUXF3 CCD. Bromelain	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
859	O215	Galactose-alpha-1,3-galactose(alpha-gal) - Thyroglobulin, bovine	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

**ALBERI**

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
748	T3	Betulla(Betulla verrucosa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
749	T4	Nocciolo(Corylus avellana)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T5	T5	Faggio Americano(Fagus grandifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
841	T7	Quercia bianca(Quercus alba)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
747	T9	Olivo(Olea europea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
746	T11	Platano(Platanus acerifolia)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
808	T12	Salice(Salix caprea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
809	T16	Pino Strobo(Pinus strobus)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
801	T23	Cipresso Mediterraneo(Cipresso sempervirens)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T208	T208	Tiglio(Tilia cordata)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti alberi</b>					
T0215	T215	rBet v 1 PR-10 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T0216	T216	rBet v 2 Profilin Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T0220	T220	rBet v 4 Birch - Betulla verrucosa	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T0224	T224	rOle e 1 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T0227	T227	nOle e 7 LPT Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
T0240	T240	rOle e 9 Olive - Olea europaea	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ERBE</b>					
802	W1	Artemisiifolia - Ambrosia comune(Elatior)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
751	W3	Ambrosia gigante(Trifida)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
711	W6	Assenzio selvatico(Artemisia vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
837	W8	Dente di leone(Taraxacum vulgaris)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
W10	W10	Farinaccio(Chenopodium album)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
840	W12	Verga d'oro(Solidago virgaurea)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
757	W21	Parietaria judaica (Erba dei muri)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
838	W45	Erba medica(Medicago sativa)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
839	W207	Lupino(Lupinus spp)	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>ricombinanti erbe</b>					
W211	W211	rPar j 2 LTP Wall pellitory - Parietaria judaica	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
W230	W230	n Amb a 1 Ragweed - Ambrosia elatior	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
W231	W231	nArt v 1 Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
860	W233	nArt v 3 LTP Mugwort - Artemisia vulgaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
<b>PARASSITI</b>					
842	P1	Ascaris	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO
844	P4	Anisakis	Pr. T. Trasparente alta stretta	max 4 gg.	OGLIO-PO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

## APPENDICE 1 - PANNELLI STANDARD CONCORDATI CON ALLERGOLOGI

<b>PANNELLO STANDARD ALIMENTI ADULTI</b>		
<b>(cod. inserimento ALI)</b>		
cod. lis	cod.int.	allergene
720	F1	Albume
722	F2	Latte
723	F3	Pesce (Merluzzo)
726	F4	Grano
724	F9	Riso integrale
725	F13	Arachidi
737	F14	Semi di soia
744	F17	Nocciola
739	F24	Gambero
733	F25	Pomodoro
774	F85	Sedano
741	F95	Pesca

<b>PANNELLO STANDARD ALIMENTI BAMBINI</b>		
<b>(cod. inserimento ALIB)</b>		
cod.lis	cod.int.	allergene
720	F1	Albume
723	F3	Pesce (Merluzzo)
726	F4	Grano
724	F9	Riso integrale
725	F13	Arachidi
737	F14	Semi di soia
733	F25	Pomodoro
768	F49	Mela
745	F75	Tuorlo
769	F76	nBos d 4 alpha-lactalbumin, Milk - Bos spp.
770	F77	nBos d 5 beta-lactoglobulin, Milk - Bos spp.
771	F78	nBos d 8 Casein, Milk - Bos spp. - Bos spp.

<b>PANNELLO STANDARD INALANTI</b>		
<b>(cod. inserimento INA)</b>		
cod.lis	cod.int.	allergene
716	D1	Dermatophagoides pteronyssinus
717	D2	Dermatophagoides farinae
H1	H1	Polveri di casa (Greer)
714	E1	Forfora di gatto
E5	E5	Forfora di cane
710	G6	Coda di topo - Codolina
719	M6	Alternaria Alternata
759	K82	IgE spec. per lattice
748	T3	Betulla verrucosa
747	T9	Olivo
711	W6	Assenzio selvatico
757	W21	Parietaria judaica (Erba dei muri)

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

## APPENDICE 2 - PROFILI PER REPARTI PROGRAMMATI SULLA CARTELLA ELETTRONICA

### PROFILO: OP Cardiologia completo

65;BNP  
 23;Calcemia  
 18;Colesterolo LDL  
 41;Creatinina UAR  
 300R;Emocromo + formula  
 105;Magnesiemia  
 65A;NT-PRO BNP  
 OP31K;POTASSIO  
 202;Proteina C Reattiva  
 31N;Sodio  
 00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR  
 00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE  
 21;Trigliceridi

### PROFILO: OP Cardiologia miocardite pericardite

A24;ANA (Anticorpi Anti Nucleo)  
 228;Chlamydia trachomatis-Neisseria gonorrhoeae ric. dir.  
 229G;Citomegalovirus - anticorpi IgG  
 229M;Citomegalovirus - anticorpi IgM  
 A26;ENA screening (anticorpi anti antigeni nucleari estraibili)  
 231 M;Epstein-Barr Virus - VCA - anticorp IgM  
 00108;FIBRINOGENO  
 214IGA;IgA  
 214IGG;IgG  
 214IGM;IgM  
 11P;Profilo elettroforesi  
 202;Proteina C Reattiva  
 201;RA - TEST (Fattore Reumatoide)  
 M39A;TSH REFLEX INTERNI  
 200;Titolo anti streptolisisnico  
 315;Velocità di eritrosedimentazione  
 A25;dsDNA (anticorpi anti DNA nativo)

### PROFILO: OP Chirurgia epatico

45;ALT  
 44;AST  
 4;Bilirubina totale reflex  
 52;FOSFATASI ALCALINA  
 35;GAMMAGT

### PROFILO: OP Chirurgia mini routine

1;Azoto ematico UAR  
 41;Creatinina UAR  
 300R;Emocromo + formula  
 2;Glucosio ematico  
 OP31K;POTASSIO  
 31N;Sodio

### PROFILO: OP Ortopedia operatorio

45;ALT  
 44;AST  
 59;Colinesterasi  
 41;Creatinina UAR  
 300R;Emocromo + formula  
 00108;FIBRINOGENO  
 35;GAMMAGT  
 OP31K;POTASSIO

### PROFILO: OP Chirurgia prericovero

27;Cloruremia  
 41;Creatinina UAR  
 300R;Emocromo + formula  
 2;Glucosio ematico  
 OP31K;POTASSIO  
 31N;Sodio  
 00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR  
 00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE



cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

**PROFILO: OP Medicina routine**

45;ALT  
44;AST  
39;Acido urico  
261;Albumina  
55;Amilasi  
4;Bilirubina totale reflex  
23;Calcemia  
27;Cloruremia  
51;Creatinfosfochinasi  
41;Creatinina UAR  
52;FOSFATASI ALCALINA  
35;GAMMAGT  
2;Glucosio ematico  
49;LATTICODEIDROGENASI  
105;Magnesiemia  
OP31K;POTASSIO  
11P;Profilo elettroforesi  
202;Proteina C Reattiva  
31N;Sodio  
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR  
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE  
400;URINE: ESAME COMPLETO

**PROFILO: OP Medicina mini routine**

45;ALT  
44;AST  
55;Amilasi  
4;Bilirubina totale reflex  
23;Calcemia  
51;Creatinfosfochinasi  
41;Creatinina UAR  
300R;Emocromo + formula  
35;GAMMAGT  
2;Glucosio ematico  
OP31K;POTASSIO  
31N;Sodio  
00112;TEMPO DI PROTROMBINA UAR  
00110;TEMPO DI TROMBOPLASTINA

**PROFILO: OP Psichiatria**

45;ALT  
44;AST  
27;Cloruremia  
17;Colesterolo totale  
51;Creatinfosfochinasi  
41;Creatinina UAR  
00001;D-DIMERO  
300R;Emocromo + formula  
00108;FIBRINOGENO  
35;GAMMAGT  
2;Glucosio ematico  
49;LATTICODEIDROGENASI  
OP31K;POTASSIO  
366;PROCALCITONINA  
202;Proteina C Reattiva

**PROFILO: OP Medicina completo**

39;Acido urico  
261;Albumina  
4;Bilirubina totale reflex  
52;FOSFATASI ALCALINA  
49;LATTICODEIDROGENASI  
105;Magnesiemia  
11P;Profilo elettroforesi  
21;Trigliceridi  
400;URINE: ESAME COMPLETO

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

### APPENDICE 3 - PROFILI PER REPARTI PROGRAMMATI SUL LIS

DAUTILIZZARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DELLA

#### MEDICINE - DAY HOSPITAL MEDICINA

##### MEDR - MEDICINA (POOP)

###### ROUTINE

105	Magnesio	25	Fosforo
OP30	Albumina siero	39	Acido urico
66	Sideremia	23	Calcio
202	Proteina C Reatt.	OP4	Bilirubina
35	GGT	51	CPK
11	EF siero	10B	Proteine Tot
49	LHD	21	Trigliceridi
44	AST (GOT)	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	OP31K	Potassio
27	Cloro	17	Colesterolo tot.
2	Glicemia	41	Creatinina
52	Fosfatasi Alcal.	400	Esame Urine
OP331	T. di Quick	OP329	PTT

**N.B. IL PROFILO NON COMPRENDE IL TSH REFLEX, ALL'OCCORRENZA AGGIUNGERE CON IL COD. M39A**

##### MEDU - MEDICINA (POOP)

###### URGENZE

300E	EMOCROMO rout.
300F	Formula Leucocitaria
2	Glicemia
41	Creatinina
31N	Sodio
OP31K	Potassio
23	Calcio
44	AST (GOT)
45	ALT (GPT)
51	CPK
35	GGT
OP4	Bilirubina
OP331	Tempo di Quick
OP329	PTT

##### MEDC - MEDICINA (POOP)

###### COMPLETAMENTO

105	Magnesio
OP4	Bilirubina
11	Elettroforesi Proteine
10B	Proteine Totali
25	Fosforo
OP30	Albumina siero
39	Acido Urico
66	Sideremia
T224	Ferritina
202	Proteina C Reattiva
49	LDH
21	Trigliceridi
17	Colesterolo totale
52	Fosfatasi Alcalina
400	Esame Urina

##### DHR - DAY HOSPITAL MEDICINA ONC. (POOP)

###### ROUTINE

300E	EMOCROMO rout.	202	Proteina C Reattiva	OP327	Fibrinogeno
300F	Formula Leucocitaria	315	Ves	337	Tempo di Trombina
1	Azotemia	44	AST (GOT)	T312	HBsAg
2	Glicemia	45	ALT (GPT)	T313	HBsAb
41	Creatinina	OP4	Bilirubina	T314	HBcAb
31N	Sodio	59	Colinesterasi	T315	HBeAg
OP31K	Potassio	51	CPK	T316	HBeAb
23	Calcio	49	LDH	T317	HBcAg
105	Magnesio	62	Fosfatasi Alcalina	T327	HCV
66	Sideremia	11	Elettroforesi sierica	400	Esame Urine
67	Transferrina	10B	Proteine Totali		
T324	Ferritina	OP30	Albumina		
21	Trigliceridi	OP331	Tempo di Quick		
17	Colesterolo totale	OP329	PTT		

##### DHU - DAY H. MED. ONC. URG. (POOP)

###### URGENZA

300E	Emocromo routine
300F	Formula Leucocitaria
1	Azotemia
2	Glicemia
41	Creatinina
31N	Sodio
OP31K	Potassio
23	Calcio
105	Magnesio
44	AST (GOT)
45	ALT (GPT)
OP4	Bilirubina

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

## CARDIOLOGIA

### CARR1 - CARDIOLOGIA (POOP) PROFILO LIPIDICA + PCR

17 Colesterolo totale \_\_\_\_\_  
 16 Colesterolo HDL \_\_\_\_\_  
 18 Colesterolo LDL \_\_\_\_\_  
 21 Trigliceridi \_\_\_\_\_  
 202 Proteina C Reattiva \_\_\_\_\_

### CARR2 - CARDIOLOGIA (POOP) ROUTINE INTEGRATIVA

11 Elettroforesi Proteine \_\_\_\_\_  
 10B Proteine Totali \_\_\_\_\_  
 39 Acido Urico \_\_\_\_\_  
 OP4 Bilirubina \_\_\_\_\_  
 44 AST (GOT) \_\_\_\_\_  
 45 ALT (GPT) \_\_\_\_\_  
 35 GGT \_\_\_\_\_  
 52 Fosfatasi Alcalina \_\_\_\_\_

### CARU1 - CARDIOLOGIA (POOP) MINI ROUTINE CON ENZIMI

300U Emocromo senza form. \_\_\_\_\_  
 1 Azotemia \_\_\_\_\_  
 2 Glicemia \_\_\_\_\_  
 41 Creatinina \_\_\_\_\_  
 31N Sodio \_\_\_\_\_  
 OP31K Potassio \_\_\_\_\_  
 44 AST (GOT) \_\_\_\_\_  
 45 ALT (GPT) \_\_\_\_\_  
 53 CKMB massa \_\_\_\_\_  
 64A Troponina \_\_\_\_\_  
 OP331 Tempo di Quick \_\_\_\_\_  
 OP329 PTT \_\_\_\_\_

### CARU2 - CARDIOLOGIA (POOP) MINI ROUTINE SENZA ENZIMI

300U Emocromo senza form. \_\_\_\_\_  
 2 Glucosio \_\_\_\_\_  
 41 Creatinina \_\_\_\_\_  
 31N Sodio \_\_\_\_\_  
 OP31K Potassio \_\_\_\_\_  
 OP331 Tempo di Quick \_\_\_\_\_  
 OP329 PTT \_\_\_\_\_

### EFTP - CARDIOLOGIA (POOP) ELETTROFORESI + PROTEINE T.

11 Elettroforesi proteine siero \_\_\_\_\_  
 10B Proteine Totali \_\_\_\_\_

### EL - CARDIOLOGIA (POOP) ELETTROLITI

31N Sodio \_\_\_\_\_  
 OP31K Potassio \_\_\_\_\_  
 27 Cloro \_\_\_\_\_

### PERICAR - CARDIOLOGIA (POOP) PER PERICARDITE

OP237 Fibrinogeno	231T EBV anticorpi totali
315 VES	231M EBV anticorpi IgM
200 TAS	M39A TSH reflex interni
A24 ANA	229G Citomegalovirus IgG
A25 dsDNA	229M Citomegalovirus IgM
11 EF siero	
10B Proteine tot	
214IGA IgA	
214IGG IgG	
214IGM IgM	
201 RA test	
202 PCR	

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

**TERAPIA INTENSIVA**

POLOR - T. INTENSIVA (POOP)  
ROUTINE

<u>1</u>	<u>Azotemia</u>
<u>2</u>	<u>Glicemia</u>
<u>41</u>	<u>Creatinina</u>
<u>31N</u>	<u>Sodio</u>
<u>OP31K</u>	<u>Potassio</u>
<u>27</u>	<u>Cloro</u>
<u>23</u>	<u>Calcio</u>
<u>400</u>	<u>Esame Urine</u>

POLOU - T. INTENSIVA (POOP)  
URGENZE

<u>300U</u>	<u>Emocromo senza form.</u>
<u>1</u>	<u>Azotemia</u>
<u>2</u>	<u>Glicemia</u>
<u>41</u>	<u>Creatinina</u>
<u>31N</u>	<u>Sodio</u>
<u>OP31K</u>	<u>Potassio</u>
<u>27</u>	<u>Cloro</u>
<u>23</u>	<u>Calcio</u>
<u>OP331</u>	<u>Tempo di Quick</u>
<u>OP329</u>	<u>PTT</u>
<u>OP327</u>	<u>Fibrinogeno</u>

POLON - T. INTENSIVA (POOP)  
NUTRIZIONE

<u>44</u>	<u>AST (GOT)</u>
<u>45</u>	<u>ALT (GPT)</u>
<u>35</u>	<u>GGT</u>
<u>OP4</u>	<u>Bilirubina</u>
<u>52</u>	<u>Fosfatasi Alcalina</u>
<u>10</u>	<u>Proteine Totali</u>
<u>OP30</u>	<u>Albumina</u>
<u>245</u>	<u>Prealbumina</u>
<u>17</u>	<u>Colesterolo totale</u>
<u>21</u>	<u>Trigliceridi</u>
<u>66</u>	<u>Sideremia</u>
<u>67</u>	<u>Transferrina</u>
<u>25</u>	<u>Fosforo</u>
<u>105</u>	<u>Magnesio</u>
<u>400</u>	<u>Esame Urine</u>

PAC - T. INTENSIVA (POOP)  
POLMONITE ACUTA COMUNITA'

<u>226G</u>	<u>Mycoplasma p. Ab IgG</u>
<u>226M</u>	<u>Mycoplasma p. Ab IgM</u>
<u>227G</u>	<u>Chlamydia p. Ab IgG</u>
<u>227M</u>	<u>Chlamydia p. Ab IgM</u>
<u>263</u>	<u>Legionella p. Ag. Urine</u>
<u>266</u>	<u>Pneumococco Ag. Urine</u>
<u>909</u>	<u>Colturale Escreato</u>

Oltre al codice "PAC" digitare:  
900 Emocoltura  
INSERIRE PIU' VOLTE secondo necessità,  
(ogni volta specificare nella tendina che si apre la tipologia del flacone ).  
SE NECESSARIO, proseguire il caricamento con il codice  
GEN - BK ricerca con sonde genetiche

POLOMIC - T. INTENSIVA (POOP)  
MICROBIOLOGIA POLO

<u>912</u>	<u>Tampone Faringeo</u>
<u>924N</u>	<u>Tampone per MRSA</u>

MICROTI - T. INTENSIVA (POOP)  
MICROBIOLOGIA POLO

<u>912</u>	<u>Tampone Faringeo</u>
<u>924N</u>	<u>Tampone per MRSA</u>
<u>903</u>	<u>Urinocoltura</u>
<u>951</u>	<u>Broncoaspirato Colturale</u>

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

**AREA CHIRURGICA - DAY SURGERY**

**MRCH - CHIRURGIA (POOP)**  
MINI ROUTINE

300E	Emocromo routine	<b>OP31K</b>	Potassio
300F	Formula leucocitaria	27	Cloro
1	Azotemia		
2	Glicemia		
41	Creatinina		

**PROGIN - CHIRURGIA (POOP)**  
PRE OPERATORI GIN

300U	Emocromo senza form.		
1	Azotemia		
2	Glicemia		
OP331	Tempo di Qick		
OP329	PTT		
400	Esame Urine		

**PEP - CHIRURGIA (POOP)**  
PROFILO EPATICO

44	AST (GOT)		
45	ALT (GPT)		
35	GGT		
52	Fosfatasi Alcalina		
<b>OP4</b>	Bilirubina		

**PRER - PRE RICOVERO (POOP)**  
ROUTINE

300E	Emocromo routine		
300F	Formula leucocitaria		
2	Glicemia		
41	Creatinina		
31N	Sodio		
<b>OP31K</b>	Potassio		
27	Cloro		
OP331	Tempo di Quick		
OP329	PTT		

**PREMR - PRE RICOVERO (POOP)**  
MINI ROUTINE

300E	Emocromo routine		
300F	Formula leucocitaria		
OP331	Tempo di Quick		
OP329	PTT		

**PRETIR - PRE RICOVERO (POOP)**  
TIROIDE

M39A	TSH REFLEX		
23	Calcio		
25	Fosforo		

**PRORT - PRE OPER ORTOPEDIA (POOP)**

300E	Emocromo routine		
300F	Formula leucocitaria		
44	AST		
45	ALT		
35	GGT		
59	Colinesterasi		
41	Creatinina		
31N	Sodio		
<b>OP31K</b>	Potassio		
27	Cloro		
OP331	Tempo di Quick		
OP329	PTT		
OP327	Fibrinogeno		

**OSSO - PRE RICOVERO (POOP)**  
BANCA OSSO

T312	Antigene HBsAg		
T313	Anti AU HBsAb		
T214	Anti Core HBcAb		
T217	Anti Core IgM HBcAg		
T223	Anti HIV 1-2		
T227	Anti HCV		
T222	TPHA		

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

### PSICHIATRIA

#### PSIR - PSICHIATRIA (POOP)

##### ROUTINE

300E	Emocromo routine	17	Colesterolo totale
300F	Formula leucocitaria	21	Trigliceridi
2	Glicemia	44	AST (GOT)
41	Creatinina	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	35	GGT
OP31K	Potassio	400	Esame Urine
27	Cloro		

### DIALISI

#### DIAOP - DIALISI (POOP)

##### CONTROLLO MENSILE

300E	Emocromo routine	23	Calcemia
300F	Formula Leucocitaria	25	Fosforo
1	Azotemia	105	Magnesio
2	Glicemia	44	AST (GOT)
41	Creatinina	45	ALT (GPT)
31N	Sodio	66	Sideremia
OP31K	Potassio	67	Transferrina
27	Cloro	T224	Ferritina

#### DIAOP2 - DIALISI (POOP)

##### CONTROLLO TRIMESTRALE

47	Amilasi Pancreatica	11	Elettroforesi proteine
22	Lipasi	10B	Proteine Totali
39	Acido Urico	OP30	Albumina
17	Colesterolo totale	202	Proteina C Reattiva
16	Colesterolo HDL	P1NP	P1NP
18	Colesterolo LDL	M47	Acido Folico
21	Trigliceridi	M48	Vitamina B
OP4	Bilirubina totale	M59	25-OH Vitamina D
51	CPK	M58P	PTH
49	LDH		
35	GGT		
52	Fosfatasi Alcalina		

### CENTRI ANTIDIABETICI

#### CAV - C. ANTIDIABETICO VIADANA (POOP)

##### PROFILO CAV

2	Glicemia
T59	Hb Glicosilata
400	Esame Urine

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

**PRONTO SOCCORSO**

OPPSE - PS ENZIMI (POOP)

52 Fosfatasi alcalina  
59 Colinesterasi  
55 Amilasi  
107 Lipasi

OPPSC - PS CARDIACI (POOP)

51 CK  
49 LDH  
53 CKMB massa  
54 Mioglobina  
65 BNP  
64A TROPONINA

OPPSR - PS ROUTINE (POOP)  
ROUTINE

1 Azoto ematico UAR  
23 Calcio  
202 Proteina C Reatt.  
OP4 Bilirubina  
35 GGT  
300U EMOCROMO URG  
105 Magnesio  
44 AST (GOT)  
45 ALT (GPT)  
31N Sodio  
OP31K Potassio  
27 Cloro  
2 Glicemia  
41 Creatinina UAR  
OP331 T. di Quick  
OP329 PTI

**TAO COOPERATIVE**

OPTAOC - TAO COOPERATIVE (POOP)

COPREL Prelievo capillare per TAO coop.  
COQUI Tempo di protrombina coop.  
COVISB Visita breve per TAO coop.

cod. num.	cod. mnemonico	nome esame	contenitore / modalità di prelievo / conservazione(*)	tempi di esecuzione	sede esecuzione
-----------	----------------	------------	---	---------------------	-----------------

**OSPEDALE DI VIADANA**

OPVIOI - OSP. VIA. INGRESSO (POOP)

300E	Emocromo routine
300F	Formula leucocitaria
315	VES
44	AST
45	ALT
35	GGT
2	Glicemia
202	ProteinaC reattiva
41	Creatinina UAR
1	Azoto ureico UAR
23	Calcio
31N	Sodio
OP31K	Potassio
27	Cloro
52	Fosfatasi alcalina
4	Bilirubina reflex
11	Elettroforesi proteine
10B	Proteine Totali
OP331	Tempo di Quick
OP329	PTT
400	Esame urine chimico-fisico

OPVIOD - OSP. VIA. DIABETE (POOP)

T59	Emoglobina glicata
OP327	Fibrinogeno
39	Acido urico
17	Colesterolo totale
16	Colesterolo HDL
21	Trigliceridi
51	CK
404	Albuminuria
M39R	TSH Reflex